



ProCare IC



AMG Medical inc.
Alpharetta, GA 30022 • 1-866-321-4846
Montreal, QC H4T 1V5 • 1 (800) 363-2381
www.amgmedical.com

Détaillant : Ce manuel doit être fourni à l'utilisateur du fauteuil roulant.
Utilisateur : Avant usage, lire ce manuel et le conserver pour références futures.

www.airgomobility.com

Bienvenue

Table des Matières

Lire avant d'utiliser votre fauteuil Airgo®2

Modèles Airgo® ProCare IC offerts.....3

Contrôle des infections.....
4

Mesures de sécurité de base4

Avertissements généraux.....
5

Manipulation sécuritaire de votre fauteuil7

Stabilité et équilibre7
Inclinaisons, étirements et rotations.....
7
Transferts
8
Inclinaisons
8
Inclinaisons sur rampes et pentes9
Trottoirs et marches9
Pour vous déplacer par vous-même10

Mode d'assemblage11
Installation / ajustement du repose-pied pivotant.....11
Installation / ajustement du repose-jambe élévateur et pivotant.....13
Blocage des roues15
Comment retirer / replacer les appuis-bras amovibles15
Changement de la hauteur siège-au-plancher
16

Entretien.....17
Nettoyage et désinfection
18
Désinfection des points de contact18
Rangement
19
Outils requis.....
19

Dimensions et poids20

Notes21

Note: Visitez www.airgomobility.com pour toute mise à jour des informations.

Lire avant d'utiliser votre fauteuil Airgo®

CHOISIR LE FAUTEUIL APPROPRIÉ

Airgo® offre une gamme variée d'accessoires et de configurations de fauteuils roulants, afin de mieux répondre aux besoins de chaque utilisateur. Cependant, la sélection finale des options, ajustements et accessoires doit être faite par vous, avec l'assistance de votre conseiller(ère) santé et / ou de votre détaillant Airgo®. Le niveau optimal de cette sélection dépend de plusieurs facteurs, tels que :

1. Votre degré de handicap physique, de force, d'équilibre et de coordination.
2. Les risques ou difficultés que vous devez maîtriser et les différents environnements où vous serez appelé(e) à utiliser votre fauteuil roulant (domicile, lieu de travail et autres endroits fréquentés sur une base régulière).
3. Les options requises ou désirées pour votre confort et sécurité.

RELISEZ CE MANUEL FRÉQUEMMENT

Préalablement à l'utilisation du fauteuil roulant, vous et chaque personne susceptible de vous assister devriez lire ce manuel de façon attentive et suivre toutes les instructions décrites dans les pages suivantes. Revoyez les avertissements et précautions requises jusqu'à ce qu'ils vous soient familiers.

Des copies additionnelles de ce guide sont disponibles sur demande auprès de votre détaillant Airgo® autorisé.

DES QUESTIONS ?

Nous désirons vous remercier d'avoir choisi un fauteuil Airgo®. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre détaillant Airgo® autorisé ou à composer le 1 800 363-2381 pour parler directement à un de nos représentants au service à la clientèle.


Le service à la clientèle Airgo® : un service humain.

Modèles Airgo® ProCare IC offerts

- 700-502:** siège de 40,6 cm (16"), appuis-bras fixes, repose-pieds fixes, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-602:** siège de 45,7 cm (18"), appuis-bras fixes, repose-pieds fixes, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-525:** siège de 40,6 cm (16"), appuis-bras fixes, repose-pieds détachables pivotants, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-625:** siège de 45,7 cm (18"), appuis-bras fixes, repose-pieds détachables pivotants, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-526:** siège de 40,6 cm (16"), appuis-bras fixes, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-626:** siège de 45,7 cm (18"), appuis-bras fixes, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-527:** siège de 40,6 cm (16"), appuis-bras de bureau détachables, repose-pieds pivotants détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-627:** siège de 45,7 cm (18"), appuis-bras de bureau détachables, repose-pieds pivotants détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-528:** siège de 40,6 cm (16"), appuis-bras de bureau détachables, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-628:** siège de 45,7 cm (18"), appuis-bras de bureau détachables, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-523:** siège de 40,6 cm (16"), appuis-bras pleine longueur détachables, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-623:** siège de 45,7 cm (18"), appuis-bras pleine longueur détachables, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-522:** siège de 40,6 cm (16"), appuis-bras pleine longueur détachables, repose-pieds détachables pivotants, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-622:** siège de 45,7 cm (18"), appuis-bras pleine longueur détachables, repose-pieds détachables pivotants, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-629:** siège de 50,8 cm (20"), appuis-bras de bureau détachables, repose-pieds détachables pivotants, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-630:** siège de 50,8 cm (20"), appuis-bras de bureau détachables, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 136 kg (300 livres)
- 700-631:** siège de 55,8 cm (22"), appuis-bras de bureau détachables, repose-pieds détachables pivotants, capacité de 158,7 kg (350 lb)
- 700-632:** siège de 55,8 cm (22"), appuis-bras de bureau détachables, repose-jambes élévateurs détachables, capacité de 158,7 kg (350 lb)

CONTRÔLE DES INFECTIONS

Grâce aux commentaires de professionnels de la santé, nous avons identifié et redessiné les cinq points de contact principaux sur votre nouveau fauteuil roulant Airgo ProCare IC. Ces points de contact empêchent la propagation des infections en limitant la croissance des organismes sur leur surface et en étant facile à nettoyer. Pour plus d'informations sur le nettoyage et la désinfection de votre fauteuil roulant Airgo ProCare IC, veuillez vous référer à la page 18 de ce manuel.

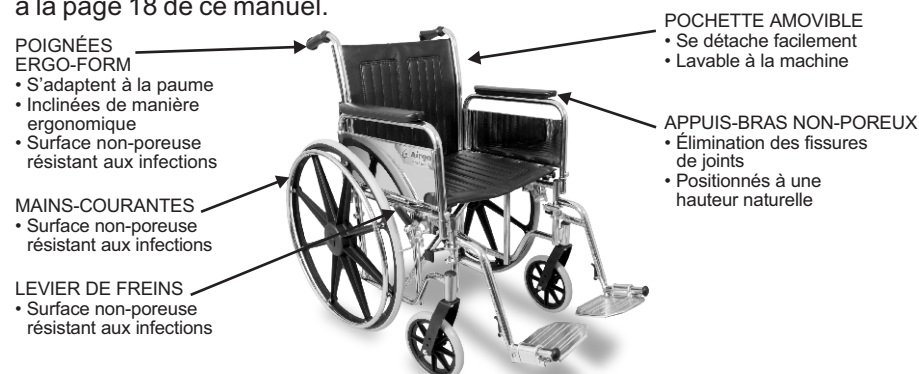

Mesures de sécurité de base

Avant d'utiliser votre fauteuil roulant, veuillez bien lire et garder à l'esprit les mesures de sécurité suivantes. Une non-conformité à ces mesures pourrait entraîner des blessures personnelles et / ou des dommages à votre fauteuil.

- Avant l'utilisation, vous devriez recevoir, d'un détaillant autorisé et / ou d'un (e) conseiller (ère) santé, un entraînement sur l'usage sécuritaire d'un fauteuil roulant.
- Après avoir engagé les verrous à roues, entraînez-vous à vous pencher, à atteindre des objets ou effectuer des transferts, en considérant toujours les limites de vos aptitudes.
- NE tentez JAMAIS de nouvelles manœuvres par vous-même, avant d'avoir la certitude de pouvoir les effectuer de façon sécuritaire.
- Familiarisez-vous avec les endroits où vous avez l'intention d'utiliser votre fauteuil roulant.
- Portez attention aux risques et apprenez à les éviter.
- Pour plus de sécurité, un mécanisme anti-bascule est recommandé.

- Assurez-vous que votre fauteuil roule correctement, avec aisance et que tout fonctionne adéquatement.
- Portez attention à tout bruit, vibration ou changement dans le fonctionnement, qui pourrait indiquer un relâchement des attaches ou un dommage à votre fauteuil.
- Consultez toujours un détaillant Airgo® autorisé pour identifier et corriger un problème, ou si vous avez un doute quelconque sur la condition de votre fauteuil roulant.

Avertissements généraux

- N'excédez jamais le poids limite spécifié, qui s'applique au poids combiné de la personne assise et de tous les items transportés. Cela pourrait entraîner des dommages, une chute ou une perte de contrôle pouvant causer des blessures sévères à l'utilisateur.
- Ne tentez pas d'opérer votre fauteuil roulant sur les routes, rues ou autoroutes.
- N'opérez pas votre fauteuil roulant sur un terrain montagneux, accidenté ou sableux. Évitez également les surfaces huileuses, mouillées et glacées.
- Toute modification ou pièce de remplacement non autorisée peut entraîner un changement dans la structure du fauteuil roulant. Ceci représente un risque au niveau de la sécurité et annule donc la garantie du fauteuil roulant.
- N'effectuez PAS d'inclinaison ou de déclinaison supérieure à 9°.
- N'effectuez pas d'inclinaison sans mécanisme anti-bascule.
- Ne tentez pas de monter par-dessus les trottoirs ou autres obstacles. Ceci peut renverser le fauteuil et causer de sérieuses blessures et / ou des dommages.
- N'utilisez pas votre fauteuil dans les escaliers roulants. Des blessures sérieuses pourraient en résulter.
- Ne tentez pas d'atteindre des objets si vous avez à vous déplacer vers l'avant dans le siège.
- Ne vous appuyez pas au-dessus du dossier. Ceci changerait le centre de gravité et pourrait faire basculer ou renverser le fauteuil, causant des blessures et / ou des dommages.

- N'essayez pas de ramasser un objet sur le sol en vous penchant au-dessus de vos genoux. Le risque de basculer est moindre si vous tentez d'atteindre les objets par le côté.
- Vous ne devriez pas vous trouver à l'intérieur du fauteuil pendant qu'on vous transporte à bord d'un véhicule motorisé, à moins que ce véhicule soit spécialement équipé à cette fin.
- N'attachez aucun objet aux roues. Ceci peut faire basculer ou renverser le fauteuil, entraînant des blessures et / ou des dommages.
- Ne pas vous tenir debout ou vous appuyer sur les repose-pieds pendant que vous effectuez un transfert.
- Ne soulevez jamais un fauteuil roulant par ses parties amovibles.
- LE VERROU À ROUE N'EST PAS UN FREIN. Ne l'utilisez pas pour vous ralentir ou pour arrêter lorsque vous êtes en mouvement.
- Engagez toujours les verrous à roue si vous vous reposez, lors d'un transfert ou lorsque dans un monte-charge.

Manipulation sécuritaire de votre fauteuil

PLIER ET DÉPLIER LE FAUTEUIL ROULANT

Déplier

1. Penchez le fauteuil roulant vers vous, suffisamment loin pour transférer le poids hors de la roue opposée.
2. Poussez la rampe du siège vers le bas jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement ouvert.
3. La rampe du siège doit être bien appuyée dans les étriers du cadre.

Plier

1. Repliez les repose-pieds et assurez-vous qu'ils sont bien verrouillés à l'avant du fauteuil.
2. Placez-vous d'un côté du fauteuil. Des deux mains, empoignez la partie centrale du siège (une main à l'avant et une main à l'arrière) et soulevez. Le fauteuil se repliera légèrement.
3. Tenez les appuis-bras le plus loin possible de vous et tirez-les vers vous jusqu'à ce que le fauteuil se plie complètement.

Stabilité et équilibre

Pour assurer la stabilité et le bon fonctionnement de votre fauteuil, vous devez maintenir un équilibre adéquat en tout temps. Votre fauteuil roulant a été conçu pour maintenir l'équilibre tout au cours des activités normales quotidiennes, tant que vous demeurez à l'intérieur de son centre de gravité.

INCLINAISONS, ÉTIREMENTS ET ROTATIONS

Bien que cela ne soit pas recommandé, vous pouvez parfois vous pencher, vous étirer ou vous tourner tout en étant assis(se) dans votre fauteuil roulant. Consultez votre conseiller(ère) santé et / ou votre détaillant Airgo® autorisé afin de développer les techniques sécuritaires qui vous sont le mieux adaptées.

⚠ ATTENTION :

- NE placez PAS vos mains ou vos doigts entre la rampe du siège et le cadre latéral.
- NE tentez PAS d'atteindre des objets si vous devez vous déplacer vers l'avant dans le siège ou si vous devez vous étirer vers le bas, entre vos genoux.
- NE transférez PAS votre poids dans la direction de l'objet que vous désirez atteindre.

Mouvements frontaux et latéraux

1. Approchez le fauteuil roulant le plus près possible de l'objet que vous désirez atteindre.
2. Tournez les roues avant en direction avant.
3. Engagez les deux verrous de roue.

Mouvements arrière

1. Approchez le fauteuil roulant le plus près possible de l'objet.
2. Tournez les roues avant en direction avant. Étendez votre bras, mais sans changer votre position dans le siège. En cas de doute, repositionnez le fauteuil ou demandez de l'aide.

TRANSFERTS

1. Positionnez le fauteuil roulant le plus près possible du côté du siège où vous désirez être transféré(e).
2. Enlevez ou pivotez les appuis-bras.
3. Engagez les freins à roue.
4. Transférez votre poids dans le siège de transfert.

INCLINAISONS

Toute inclinaison devrait être effectuée avec l'aide d'un(e) assistant(e).

1. Tenez les poignées solidement et assurez-vous que les appuis-main sont fermement insérés.
2. Assurez-vous que les pieds de l'occupant sont bien placés sur les repose-pieds et que ses bras, mains et doigts sont à l'écart des roues et de tout endroit où ils pourraient être pincés.
3. Avertissez l'occupant avant d'incliner le fauteuil roulant vers l'arrière.
4. Placez un pied sur le levier de bascule et poussez vers le bas jusqu'à ce que le point d'équilibre soit atteint (approximativement 30°).
5. Abaissez lentement la partie avant.

⚠ ATTENTION :

- NE PAS vous asseoir dans le fauteuil à moins qu'il ne soit complètement ouvert et que la rampe du siège soit fermement appuyée dans les étriers.
- Avant de tenter un transfert, assurez-vous de toujours engager les deux freins à roue.
- NE PAS vous supporter sur les repose-pieds : le fauteuil pourrait renverser.
- NE tentez PAS d'incliner votre fauteuil roulant sans assistance. L'incliner au-delà de son point d'équilibre peut causer des blessures.

INCLINAISONS SUR RAMPES ET PENTES

Ascension

Penchez le haut de votre corps légèrement vers l'avant au moment de vous engager sur une pente. S'il devient nécessaire de vous arrêter, évitez tout mouvement soudain vers l'avant : ceci pourrait vous faire renverser.

Descente

Cette manœuvre doit être effectuée avec l'aide d'un(e) assistant(e).

Allez toujours de l'avant quand vous descendez une rampe, mais NE VOUS PENCHEZ PAS vers l'avant afin d'éviter de renverser le fauteuil. Vous pencher vers l'arrière peut augmenter la stabilité légèrement. Il est essentiel de garder le fauteuil sous contrôle à tout moment et de le manipuler lentement.

TROTTOIRS ET MARCHES

Ces manœuvres doivent être effectuées avec l'aide d'un(e) assistant(e).

Monter (méthode #1)

1. Penchez le fauteuil vers l'arrière jusqu'à son point d'équilibre ($\pm 30^\circ$) et avancez jusqu'à ce que les roues avant passent par-dessus le rebord du trottoir ou de la marche.
2. Abaissez les roues avant lentement sur le trottoir ou la marche.
3. Redressez le fauteuil et poussez vers l'avant jusqu'à ce que les roues arrière roulent par-dessus le trottoir ou de la marche.
4. Assurez-vous que le fauteuil roulant a complètement dépassé le seuil du trottoir ou de la marche et ne peut pas rouler vers l'arrière.

⚠ AVERTISSEMENT :

- NE tentez AUCUNE ascension ou descente sans avoir installé de mécanisme anti-bascule.
- NE tentez AUCUNE ascension ou descente de plus de 9°. Lors des descentes, la partie inférieure du repose-pied doit être à au moins 6,4 cm du sol pour assurer un libre passage.
- NE sautez PAS en bas des trottoirs avec un fauteuil roulant.
- N'engagez pas les verrous de roues soudainement ou dans une pente. Il est préférable de rouler vers l'arrière que de basculer.
- NE PAS tenter de soulever le fauteuil roulant en le tenant par l'appui-bras amovible, les repose-jambes ou toute autre pièce détachable.

Monter (méthode #2)

1. Positionnez le fauteuil roulant « à reculons », de façon à ce que les roues arrière soient contre le rebord du trottoir ou de la marche.
2. Penchez le fauteuil roulant vers l'arrière, vers son point d'équilibre ($\pm 30^\circ$) et soulevez le fauteuil par-dessus le trottoir ou la marche.
3. Abaissez les roues avant, tout en éloignant suffisamment le fauteuil du seuil du trottoir ou de la marche.

Descendre

1. Placez le fauteuil à reculons et positionnez-vous soigneusement sur la marche inférieure.
2. Tenez fermement le fauteuil roulant et tirez-le vers vous, jusqu'à ce que les roues arrière atteignent le seuil du trottoir ou de la marche.
3. Amenez lentement les roues arrière au niveau inférieur.
4. Penchez le fauteuil vers son point d'équilibre ($\pm 30^\circ$) et retournez le vers l'avant.
5. Abaissez soigneusement les roues avant, en plaçant un pied sur le levier de bascule, jusqu'à ce que le fauteuil ait complètement dépassé le seuil du trottoir ou de la marche.

Escaliers

N'utilisez jamais votre fauteuil dans les escaliers SAUF si vous êtes aidé(e). Utilisez plutôt les rampes et les ascenseurs.

POUR VOUS DÉPLACER PAR VOUS-MÊME

1. Installez-vous confortablement dans le fauteuil.
2. Saisissez les mains courantes des roues et faites-les tourner dans la direction où vous désirez aller. Exercez-vous lentement jusqu'à ce que vous ayez développé une cadence de poussées régulière.

⚠ AVERTISSEMENT :

- Ne vous appuyez pas par-dessus le haut du siège.
- NE TENTEZ PAS de monter un trottoir élevé sans l'aide de deux assistants(es). VÉRIFIEZ TOUJOURS que les poignées sont bien installées et qu'elles ne peuvent pas tourner ou glisser.


Mode d'assemblage

ACCESSOIRES FRONTAUX

Installation du repose-pied pivotant

1. Tournez le repose-pied de côté (de façon à ce que l'appui-pied soit perpendiculaire au fauteuil).
2. Installez les plaquettes à charnières sur les pinces à charnières qui sont situées sur le châssis du fauteuil roulant.
3. Poussez le repose-pied vers l'intérieur du fauteuil roulant, jusqu'à ce qu'il entre en position barrée.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'installation de l'autre repose-pied.
5. Pour retirer le repose-pied, poussez le levier de retrait du repose-pied vers l'intérieur, tournez le repose-pied vers l'extérieur et soulevez le repose-pied hors des pinces à charnières.

NOTE – L'appui-pied se trouve à l'intérieur du fauteuil roulant lorsqu'il est en position verrouillée.

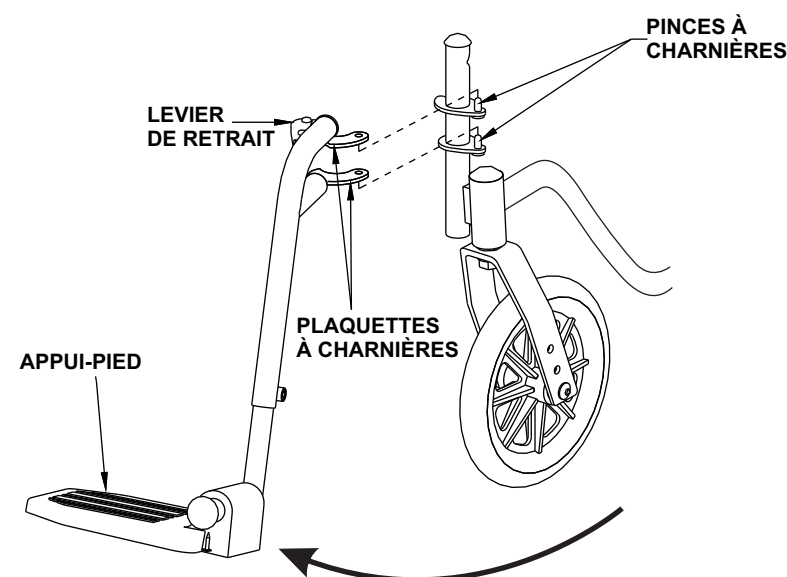


⚠ AVERTISSEMENT :

Après avoir effectué tout ajustement ou toute réparation au fauteuil roulant et AVANT l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces amovibles sont bien en place et fermement attachées, sinon des blessures ou des dommages pourraient survenir.

Ajustement du repose-pied pivotant

1. Retirez les protège-impact et / ou les lanières de mollet, si nécessaire.
2. Relâchez, mais sans retirer, le boulon et l'écrou de sécurité qui retiennent le sous-assemblage inférieur au support supérieur du repose-pied.
3. Repositionnez le sous-assemblage inférieur du repose-pied à la hauteur désirée.
4. Resserrez fermement le boulon et l'écrou de sécurité.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre repose-pied, si nécessaire.
6. Remplacez les protège-impacts et / ou les lanières de mollet, si nécessaire.
7. Réinstallez le repose-pied pivotant.

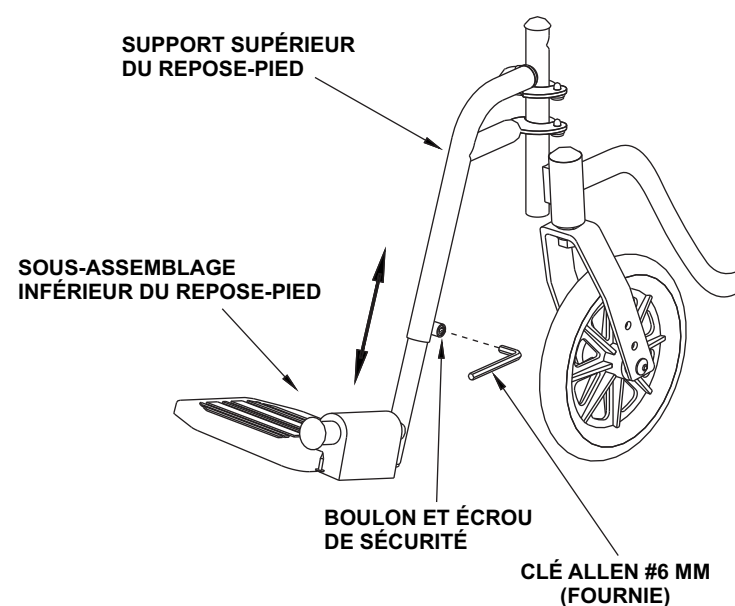


Installation du repose-jambe élévateur et pivotant

1. Placez le repose-jambe en face du fauteuil roulant et posez les plaquettes à charnières sur les pinces à charnières situées sur le châssis du fauteuil roulant.
2. Tournez le repose-jambe vers l'intérieur du fauteuil roulant jusqu'à ce qu'il se bloque en position barrée.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre repose-jambe.

NOTE – L'appui-pied se trouvera vers le centre du fauteuil roulant lorsqu'il est en position barrée.

4. Assoyez-vous dans le fauteuil roulant et ajustez la hauteur du repose-pied en dévissant l'écrou de sécurité et en glissant le tube inférieur du repose-pied vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur désirée.
5. Resserrez fermement l'écrou de sécurité.
6. Pour retirer le repose-jambe, appuyez sur le levier de relâchement vers l'intérieur (face à l'avant du fauteuil roulant) et tournez le repose-jambe vers l'extérieur du fauteuil roulant.

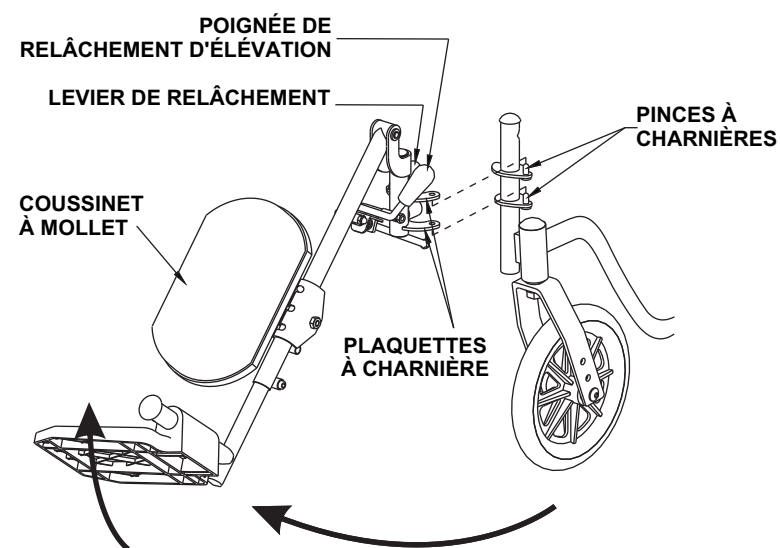


⚠ AVERTISSEMENT :

Après avoir effectué tout ajustement ou toute réparation au fauteuil roulant et **AVANT** l'utilisation, assurez-vous que toutes les pièces amovibles sont bien en place et fermement attachées, sinon des blessures ou des dommages pourraient survenir.


Ajustement du repose-jambe éleveur et pivotant

1. Pour ajuster l'élévation du repose-jambe, soulevez les jambes jusqu'à ce que la hauteur désirée soit obtenue.
2. Pour repositionner le repose-jambe à sa position normale, soutenez la jambe avec une main et appuyez sur la poignée de relâchement vers le bas avec l'autre main.
3. Pour ajuster le coussinet à mollet, tournez le coussinet vers l'extérieur du fauteuil roulant.
4. Glissez le coussinet vers le haut ou vers le bas, jusqu'à la position désirée.
5. Pour bloquer le coussinet à mollet, tournez celui-ci vers l'intérieur du fauteuil roulant.

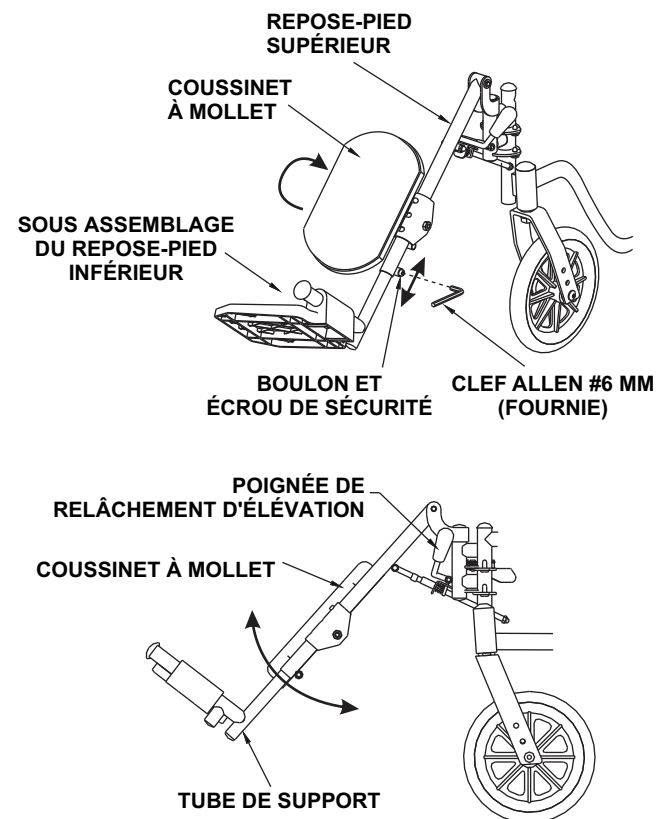

Blocage des roues

1. Assurez-vous que le verrou de roue soit en position débarrée.
2. Desserrez le boulon et l'écrou de sécurité qui retiennent le verrou à roue au châssis du fauteuil roulant.
3. Ajustez la position du verrou jusqu'à ce que la distance entre la roue arrière et le soulier du verrou soit entre 6 mm et 10 mm.
4. Resserrez solidement le boulon et l'écrou de sécurité.
5. Engagez le verrou de roue et exercez une pression sur le fauteuil roulant pour déterminer si le soulier du verrou est suffisamment engagé pour maintenir le fauteuil roulant en place.
6. Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que le verrou de roue retienne parfaitement le fauteuil roulant.

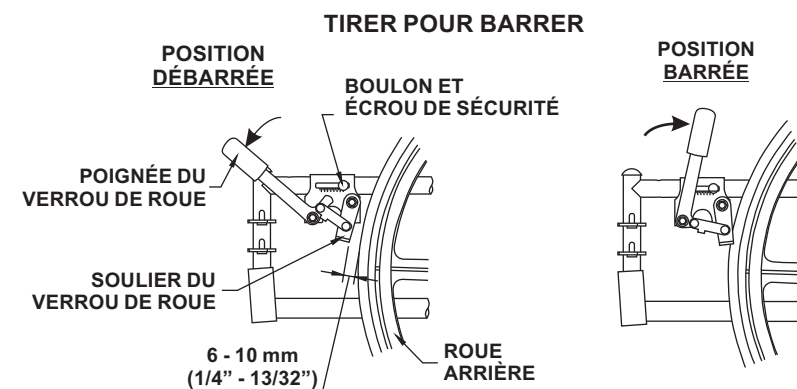


COMMENT RETIRER LES APPUIS-BRAS AMOVIBLES (SI APPLICABLE)

1. Pressez sur le bouton de verrouillage à l'avant de l'accoudoir.
2. Soulevez et retirez l'accoudoir.

COMMENT REPLACER LES APPUIS-BRAS AMOVIBLES (SI APPLICABLE)

1. Remplacez les appuis-bras.
2. Le bouton de verrouillage s'enclenchera automatiquement.

CHANGEMENT DE LA HAUTEUR SIÈGE-AU-PLANCHER

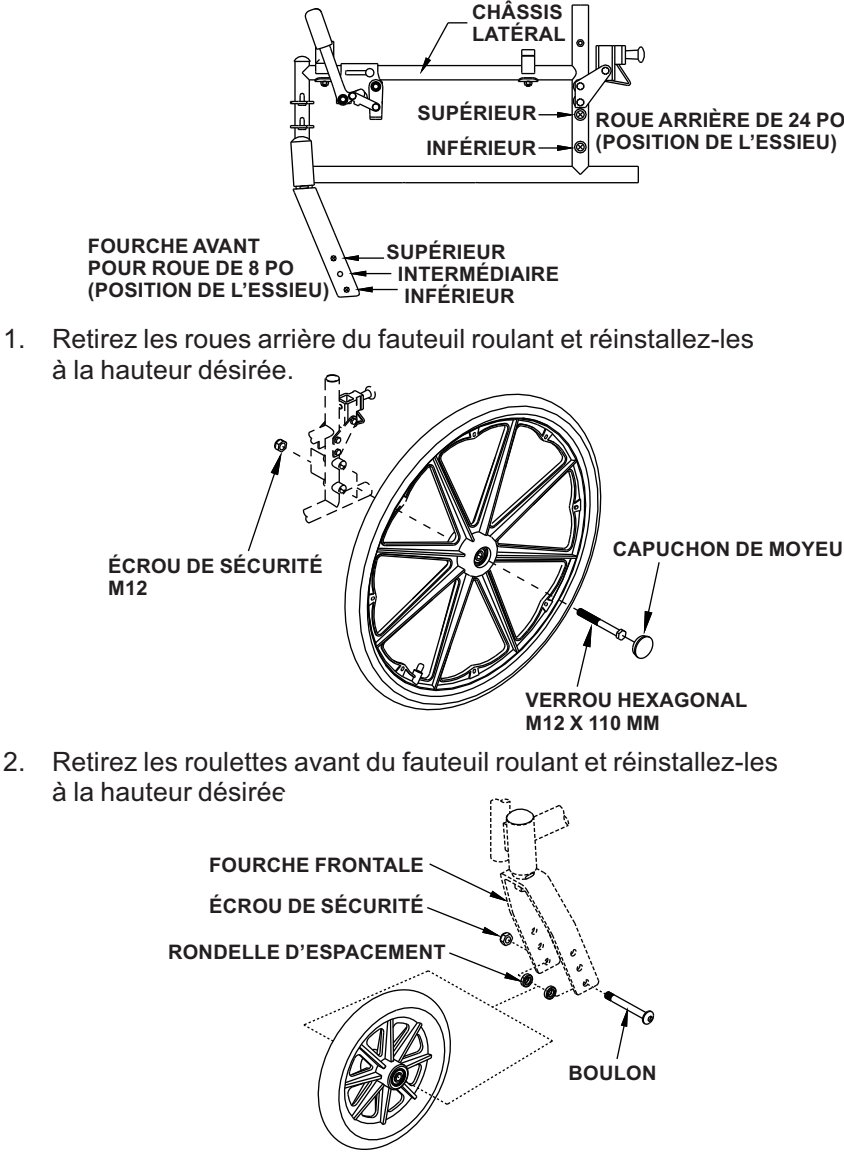

Si applicable, ajustez le système anti-basculer à la nouvelle hauteur siège-au-plancher.

Entretien

Vérification	Hebdo	Mois	Périodique
Générale Le fauteuil roule droit (ne traîne pas ou ne tire pas sur le côté)	✓		✓
Châssis et croix de support - Inspection de matériel relâché ou manquant - Inspection de châssis ou croix de support tordus			✓
Siège et dossier - Inspection de déchirures ou affaissements - Inspection de matériel cassé ou desserré - Inspection des poignées pour usure/relâchement/détérioration		✓	✓
Roues arrière Inspection de mouvement latéral excessif			✓
Mains courantes Inspection de bords rugueux ou écaillés			✓
Rayons de roue Inspection de rayons cassés	✓		
Roulettes et fourches avant - Inspection de la tension adéquate de l'assemblage de l'essieu, les roulettes devraient arriver à un arrêt graduel. - Vérifier que le matériel est bien serré - Les roulement à billes sont propres et sans humidité	✓	✓	
Pneus - Inspection de fissures et usure - Si pneumatiques, inspection du gonflage adéquat ATTENTION : Comme pour tout véhicule, les roues et pneus doivent être vérifiés périodiquement, et remplacés si nécessaire.	✓		✓
Freins à roues - Ne touchez pas la roue lorsque celle-ci est en mouvement - Points de pivot ne sont pas usés ou relâchés - Les freins à roue sont faciles à engager - Les freins à roue empêchent le fauteuil roulant de bouger.	✓	✓	✓

Entretien (suite)

NOTE – À tous les six mois, apportez votre fauteuil roulant chez un détaillant autorisé pour une inspection et révision complètes. Un nettoyage régulier identifiera les pièces usées ou relâchées et améliorera le bon fonctionnement de votre fauteuil roulant. Il doit, comme tout autre véhicule, être entretenu régulièrement afin de fonctionner adéquatement et de façon sécuritaire. Un entretien routinier augmentera la durée et l'efficacité de votre fauteuil roulant. Des ajustements initiaux doivent être effectués selon vos préférences et structure corporelle.

Nettoyage et désinfection

Pour désinfecter et nettoyer votre nouveau fauteuil roulant Airgo ProCare IC, surtout s'il est utilisé par plusieurs patients, utilisez un désinfectant antibactérien non-corrosif pour surfaces solides. Nous vous recommandons un produit écologique tel que PureGreen24, puisqu'il utilise des ions argentés ainsi que de l'acide citrique, des ingrédients naturels assez puissants pour tuer les bactéries incluant celle du SARM. De plus, PureGreen24 est un produit EPA pouvant être utilisé sur les jouets de vos enfants. Visitez www.puregreen24.com pour plus d'informations. Alternativement, la plupart des désinfectants à base de méthanol peuvent être utilisés sur votre fauteuil roulant.

Désinfection des points de contact

Les points de contact de votre fauteuil roulant Airgo ProCare IC ont été redessinés afin de prévenir la propagation des infections en limitant la croissance des organismes. Ces points (incluant la pochette amovible) sont catégorisés en tant que surfaces solides. Pour les désinfecter, vous n'avez qu'à les vaporiser de désinfectant, laisser agir au moins 30 secondes (dépendamment du type d'organismes que vous désirez éliminer) puis nettoyer le tout avec un chiffon doux ou une serviette. Lisez soigneusement les instructions d'utilisation du désinfectant choisi avant l'application puisqu'elles peuvent varier d'un produit à l'autre.

Cadre

Nettoyez et désinfectez les pièces chromées environ une fois par semaine. Si le fauteuil est utilisé par plusieurs patient, nettoyez et désinfectez dès que nécessaire. Si le fauteuil devient humide, asséchez-le dès que possible. N'utilisez jamais un nettoyant abrasif : cela pourrait érafler votre nouveau fauteuil roulant Airgo ProCare IC.

Garnitures

Les garnitures de votre fauteuil roulant Airgo ProCare IC étant considérées comme surfaces solides, elles doivent être désinfectées en même temps que le châssis. En cas d'usure ou de déchirure, la garniture devra être remplacée immédiatement afin d'éviter un affaiblissement ou une déchirure subite.

RAPPELEZ-VOUS : le siège est la partie principale supportant le poids.

Lubrification

Les pièces articulées ou pivotantes doivent être toujours bien lubrifiées. Une huile légère pour machine convient à la plupart des pièces, dont les repose-pieds, les repose-jambes élévateurs et les verrous de roues.

Roulements

Comme ils sont étanches, aucun nettoyage n'est requis.

Traverses

Ne serrez pas trop l'axe de pivot des traverses. Cela permettra aux quatre roues de rester au sol lorsque vous vous déplacez sur une surface inégale.

Grandes roues

Inspectez régulièrement les roues afin de déceler tout dévoiement ou flottement. Pour les corriger, desserrez l'écrou de l'essieu puis serrez l'essieu suffisamment pour le redresser et lui permettre de tourner librement. Resserrez fermement l'écrou et vérifiez à nouveau le mouvement de la roue.

Pneus

Assurez-vous que les pneus ne sont pas usés ou craquelés : cela pourrait rendre difficiles les déplacements et les manoeuvres. Pour un équilibre parfait, les deux pneus doivent être remplacés en même temps. À l'occasion, nettoyez les pneus avec un linge humide.

Petites roues

Enlevez les charpies, filaments et saletés qui pourraient s'agglutiner afin d'éviter le grippage ou le coincement des roues.

Mains courantes

Nettoyez et désinfectez environ une fois par semaine à la même fréquence que le châssis. Remplacez-les lorsque la surface présente des aspérités ou dès qu'elles pèlent.

Blocage des roues arrière

Vous pouvez effectuer des ajustements mineurs afin de compenser pour l'usure normale des pneus en desserrant simplement le support et en faisant glisser le dispositif vers l'avant ou l'arrière.

Rangement

1. Rangez votre fauteuil dans un endroit propre et sec afin d'éviter la corrosion.
2. Si vous entreposez votre fauteuil roulant, sans l'utiliser, pour une période de plus de trois mois, faites inspecter votre fauteuil par un détaillant autorisé Airgo® avant sa réutilisation.

Outils requis

Clés Allen : 4 mm et 6 mm Tournevis : Philips # 2
Clés à douilles : 8 mm, 10 mm, 13 mm, et 17 mm ou une clé à douilles ajustable

Dimensions & poids

		Appuis-bras fixes	Appuis-bras amovibles
Siège		45,7 cm (18")	45,7 cm (18")
		40,6 cm (16")	40,6 cm (16")
		50,8 cm (20")	53,3 cm (21")
Accoudoirs		39,3 cm (15 ½")	46,3 cm (18 ¼")
		28 cm (11")	22,2 cm (8 ¾")
		77,4 cm (30 ½")	74,2 cm (29 ¼")
Dos		40,6 cm (16")	40,6 cm (16")
Mesures générales		43 cm (17")	43 cm (17")
		92 (36 ¼")	93 cm (36 ¾")
		63,5 cm (25")	68 cm (26 ¾")
		26,6 cm (10 ½")	30,4 cm (12")
Extensions		40,6 cm (16")	40,6 cm (16")
		55,8 cm (22")	55,8 cm (22")
Poids*		16,7 kg (37 lb)	17,6 kg (39 lb)

*Poids sans les accessoires.

Notes

[illegible]