

433-EC Moniteur économique sans fil

Information importante:

Le moniteur économique sans fil 433-EC ainsi que les composantes compatibles, sont sensibles à leur environnement physique et structural. Les produits n'ayant pas d'indicateur hors portée, une vérification périodique du système dans les lieux où il est utilisé, permet de s'assurer du bon fonctionnement du système. Soyez conscient que la fiabilité du système sera réduite si il est situé hors de son rayon de portée. Les systèmes sans fil ainsi que les moniteurs sont un ajout au protocole de gestion des résidents et non un substitut à une supervision adéquate des résidents par le personnel. Nous recommandons que le personnel reçoive périodiquement une formation sur l'utilisation de l'équipement et que l'équipement soit vérifié avant chaque utilisation.

Avertissement:

Le fait de ne pas se conformer à ces avertissements peut entraîner des blessures ou même la mort. Ce produit n'est pas pertinent pour tous les individus. D'autres types d'équipements pourraient s'avérer nécessaire. Ce produit n'est pas un substitut à une supervision visuel par le personnel. Le manufacturier ne prétend pas que le produit empêchera les fugues ainsi que les chutes. Ce produit a été conçu pour permettre d'augmenter l'efficacité du personnel dans leur protocole de gestion de chute. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Lisez les directives ainsi que les avis légaux.

Le moniteur économique sans fil 433-EC de la compagnie Smart Caregive a été conçu pour permettre à l'utilisateur de faire l'installation lui-même, de ce fait il est de l'entière responsabilité de l'acheteur de s'assurer que le produit est installé adéquatement. De plus ce produit n'est pas conçu pour palier à une supervision du personnel. Une vérification du système avant chaque utilisation est obligatoire.

1. Supervision direct du résident
2. Formation adéquate du personnel
3. Vérification du système avant chaque utilisation.

Besoin d'aide

Communiquez avec votre distributeur local.



ExtraMédical

info@extramedical.com

450-416-1753



Instructions pour Installation et Utilisation

433-EC


Moniteur économique sans fil

Le *Moniteur 433-EC Smart économique sans fil* est un système sans fil. Pour installation au mur, ce système d'alarme peut recevoir le signal de nombreuses composantes (vendu séparément) comme un détecteur de mouvement, coussinet sensoriel de fauteuil, tapis de sol et un bouton d'appel.

Un an de garantie

Caractéristiques

- Interrupteur (ON/OFF)
- Volume ajustable
- Tonalité ajustable
- Fonctionne avec pile ou adaptateur CA (pièce optionnel AC-04)
- Installation au mur (vis de fixation incluses)

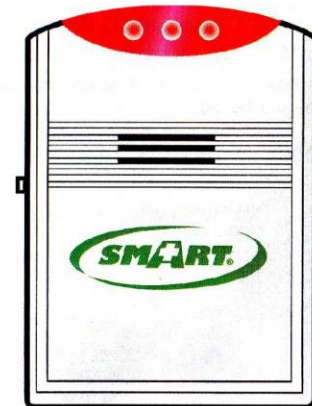

433-EC contenu de l'emballage

433-EC Moniteur économique sans fil

- Ensemble de fixation 2 vis

Aussi: 433-EC Accessoires optionnel (Vendu séparément)

433-NCA Adaptateur émetteur

433-NC Bouton d'appel

433-RB Bouton de cancellation

433-MS Détecteur de mouvement

433-EXT Détecteur porte/fenêtre Coussinets sans fil GHOST et tapis de sol

AC-04 Adaptateur CA

* Certain composant peuvent nécessiter un émetteur vendu séparément.

Instructions pour Installation et Utilisation

433-EC Moniteur économique sans fil


Étape 1

Installer les piles dans le 433-EC (non incluses)


Installez 3 piles (C) dans le compartiment du 433-EC aussi un adaptateur CA est disponible, vendu séparément. (Code le la pièce AC-04)

Installation des piles dans les composantes

433-NC Bouton d'appel optionnel (pile incluse)

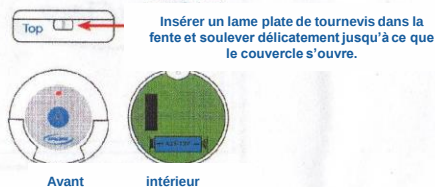

433-MS Détecteur de mouvement optionnel (piles non incluses)

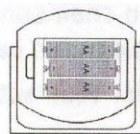

Arrière du 433-EC

433-EXT Détecteur de porte/fenêtre optionnel

Pile incluse
soulever délicatement la languette au sommet pour ouvrir le couvercle.



Arrière du détecteur

433-NCA Adaptateur optionnel



Pile déjà installée

Étape 2

Mettre en fonction soit à (OFF)


Sélectionner (Chime) ou (alarm) sur le coté droit du moniteur économique sans fil.

IMPORTANT

Le 433-EC l'alarme ou la tonalité sonnerons en continue lorsque un composant l'aura activé. Mettez le contact a (OFF) et a (chime ou alarm) pour le réamorcer à nouveau. Si le 433-EC est utilisé avec un coussinet sans fil GHOST, l'alarme retentira quand le poids sera enlevé du coussinet. Le 433-EC peut être réamorcer le contact (ON/OFF) ou en remettant du poids sur le coussinet sans fil GHOST.

Installer le 433-EC Moniteur économique sans fil (optionnel)


Le Moniteur 433-EC peut être installé au mur pour un emplacement optimum. Percer les trous en alignant avec les trous a l'arrière du moniteur prévus à cette effet avec l'ensemble de vis fournit avec le moniteur.

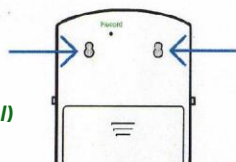

Etape 3

Programmation des composantes avec le 433-EC

Utiliser un objet pointu et tenir le bouton (Record) à l'arrière du moniteur. Relâcher le bouton quand les 2 lumières extérieur s'allument. Le moniteur économique sans fil est maintenant en mode programmation. Quand vous aurez terminé la programmation des composantes, appuyer à nouveau sur le bouton (Record).

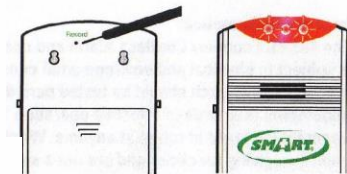

Pour le 433-NC ou 433-RB: Appuyer et relâcher le bouton (Call/Reset). Les deux lumières extérieur sur le 433-EC vont clignoter une fois pour confirmer la programmation. **La portée maximum est de 250 pieds. Lire les informations de ce feuillet.**

Pour le 433-EXT rapprocher les 2 pièces ensemble. Les 2 lumières extérieur sur le 433-EC clignoterons une fois pour confirmer la programmation. **La portée maximum est de 250 pieds. Lire les informations de ce feuillet.**



Les 2 lumières extérieur clignoteront quand la composante sera programmé.

Le sans fil GHOST® : L'émetteur doit être branché et allumé. Mettre du poids sur le coussinet. Les 2 lumières DEL extérieur du 433-EC vont clignoter une fois pour confirmer la programmation. Les moniteurs de gestion de chute (TL-2100E, TL-2100CP, TL-2100S et TL-2100V) doivent utiliser l'émetteur 433-NCA (vendu séparément) pour communiquer avec le moniteur 433-EC. **La portée maximum est de 250 pieds. Lire les informations de ce feuillet.**



Ghost Cord® Transmitter

Le 433-NCA: Pour le 433-NCA: Brancher le 433-EC dans la prise pour câble d'appel sur le côté du moniteur avant de mettre en position de programmation le 433-EC. Une fois le 433-EC en mode programmation, enclencher l'alarme du moniteur avec la composante branchée à celui-ci. Les 2 lumières DEL extérieur du 433-EC vont clignoter une fois pour confirmer la programmation. **La portée maximum est de 250 pieds. Lire les informations de ce feuillet.**



433-NCA, Adaptateur sans fil avec un moniteur de gestion de chute

Vérification de la programmation.

Vérifier tous les composantes avant utilisation. La lumière DEL clignotera et le son choisi sonnera sur le 433-EC pour indiquer quand l'alarme aura été activé.

Utilisation

Pour effacer toute la programmation.

Appuyez et tenir le bouton (Record) à l'arrière du moniteur jusqu'à ce que les lumières LED clignotent. Relâcher le bouton de programmation et maintenant tout est effacé.

✓ INFO: Lorsque vous utilisez un 433-EC (moniteur sans fil économique) avec un moniteur central 433-CMU et un 433-RB (Contact de remise à zéro):

La compagnie Smart Caregiver recommande quand vient le temps de programmer un 433-RB, le programmer seulement avec le 433-EC et non le 433-CMU. Cela permet à l'aide soignant d'arrêter l'alarme le plus tôt afin d'éviter les bruits inutiles tout en conservant l'appel sur l'unité central pour des questions de sécurité. Dès que le résident a été sécurisé, le personnel peut réinitialiser l'unité central.