



TL-5102MP Instruction rapide

1 Insérer 2 piles AA dans la pagette.

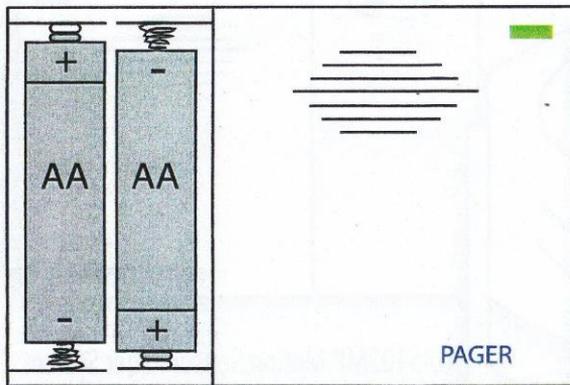


Note: Piles non incluses

2 Insérer 3 piles AA dans le détecteur de mouvement.

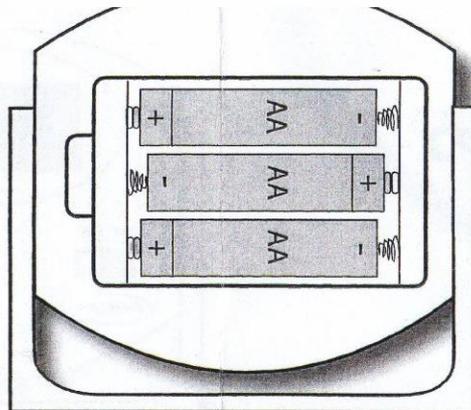


Note: Piles non incluses

3 Sélectionner la tonalité

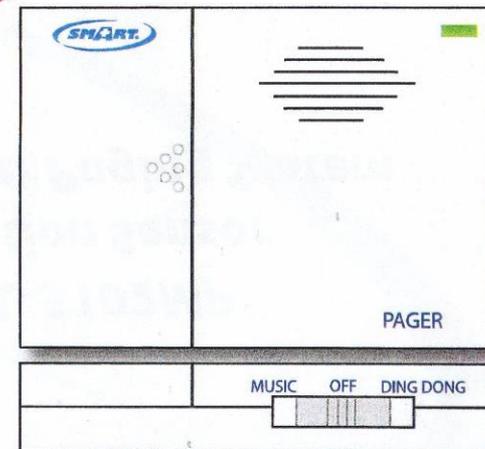


Glisser le curseur pour choisir la tonalité.


4 Installation du détecteur avec autocollant des 2 côtés

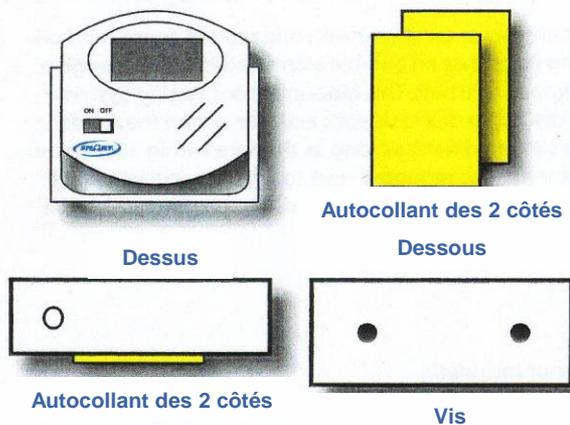

5 Allumer le détecteur de mouvement

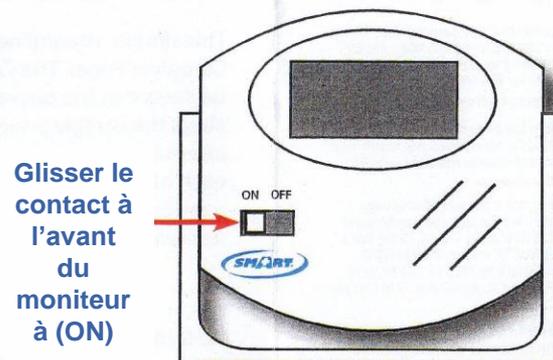

6 Vérification du système

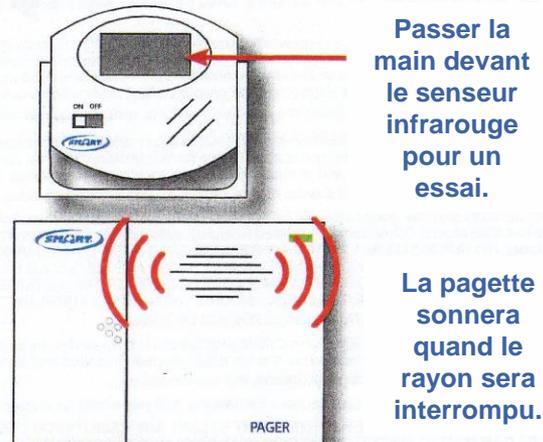

Note: Il est de responsabilité de l'intervenant de vérifier le système avant chaque utilisation.

Installer bande autocollante à l'arrière du moniteur ou utiliser les vis dans la base et installer près du lit ou un passage.

TL-5102MP Moniteur de détection de mouvement

Le fait de ne pas se conformer aux avertissements de sécurité peut entraîner des blessures ou même la mort. Ce produit n'est pas pertinent pour tous les individus. D'autres types d'équipements pourraient s'avérer nécessaires. Ce produit n'est pas un substitut à une supervision visuelle par le personnel. Le fabricant ne prétend pas que le produit empêchera les fugues ainsi que les chutes. Ce produit a été conçu pour permettre d'augmenter l'efficacité du personnel dans leur protocole de gestion de chute. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Lisez les directives ainsi que les avis légaux.

Le moniteur TL-5102MP de la compagnie Smart Caregiver a été conçu pour permettre à l'utilisateur de faire l'installation lui-même, de ce fait il est de l'entière responsabilité de l'acheteur de s'assurer que le produit est installé adéquatement. De plus ce produit n'est pas conçu pour palier une supervision adéquate par le personnel:

1. Supervision directe du résident
2. Formation adéquate du personnel
3. Vérification du système avant chaque utilisation.

AVERTISSEMENT: Le fabricant ne garantit pas que cet appareil empêchera les fugues ou les chutes. Cet appareil est conçu pour aider le personnel aidant dans une optique d'un programme d'aide au résident. Ce produit doit être utilisé par du personnel autorisé.

Besoin d'aide Communiquez avec votre distributeur local.

ExtraMédical info@extramedical.com 450-416-1753


Instructions d'installation

TL-5102MP

Détecteur de mouvement



TL-5102MP Contenu du système

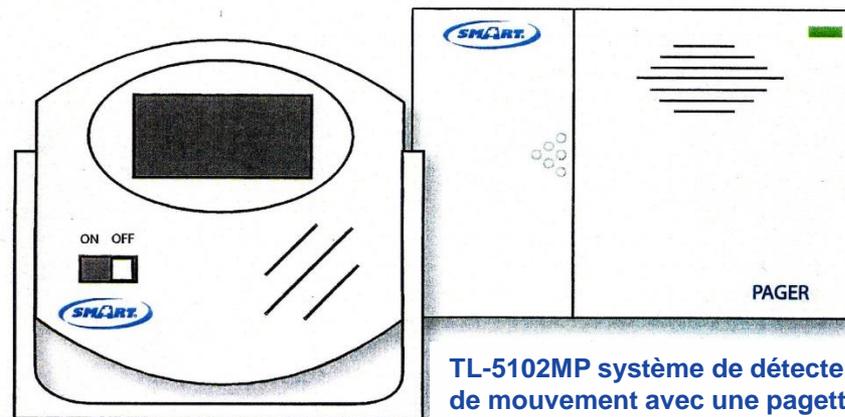

TL-5102MP système de détecteur de mouvement avec une pagette

TL-5102MP système de détecteur de mouvement avec une pagette:

Ce système comprend un détecteur de mouvement et une pagette pour le personnel soignant. La pagette émet un son lors de l'alarme et elle est assez petite pour être mise dans une poche ou accroché à une ceinture. Le détecteur de mouvement avertira le personnel soignant quand le faisceau infrarouge sera interrompu par les déplacements du résident cela dans un rayon jusqu'à 150 pieds un de l'autre. Le détecteur de mouvement peut être installé près d'un lit pour indiquer quand un résident quittera son lit ou dans un passage pour indiquer que le résident approche d'une porte. Ce système vient avec une garantie de 90 Jours.

TL-5102MP Contenu de l'emballage:

- 1 Pagette du personnel soignant (Pile non comprises)
- 1 Détecteur de mouvement (Piles non comprises)
- 2 Vis
- 2 Autocollant des deux côtés
- 90 Jours de garantie

Besoin d'aide

Communiquez avec votre distributeur local.

