



Extra Médical

1130, Rue Lévis (Suite 2)

Terrebonne, Québec.

J6W-5S6

Tel: 450-416-1750

Courriel:

info@extramedical.com

UNITÉ CENTRALE 433-CMU40






Extra Médical
 1130, Rue Lévis (Suite 2)
 Terrebonne, Québec.
 J6W-5S6
 Tel: 450-416-1753
 Courriel:
 info@extramedical.com

- 1) CALL REVIEW
- 2) VOLUME
- 3) VOICE/TONE-(CHOIX ALARME)
- 4) ADD/REPLACE
- 5) PROGRAM COMPONENTS
- 6) PROGRAMMING LIGHT
- 7) RESET
- 8) ANTENNE
- 9) COCHET
- 10) COMPARTIMENT BATTERIES
- 11) BASE
- 12) CALL/ALARM SWITCH
- 13) SILENCE PORT
- 14) LOCK/UNLOCK SWITCH
- 15) AC ADAPTER INPUT

LANGAGE ANGLAIS SEULEMENT

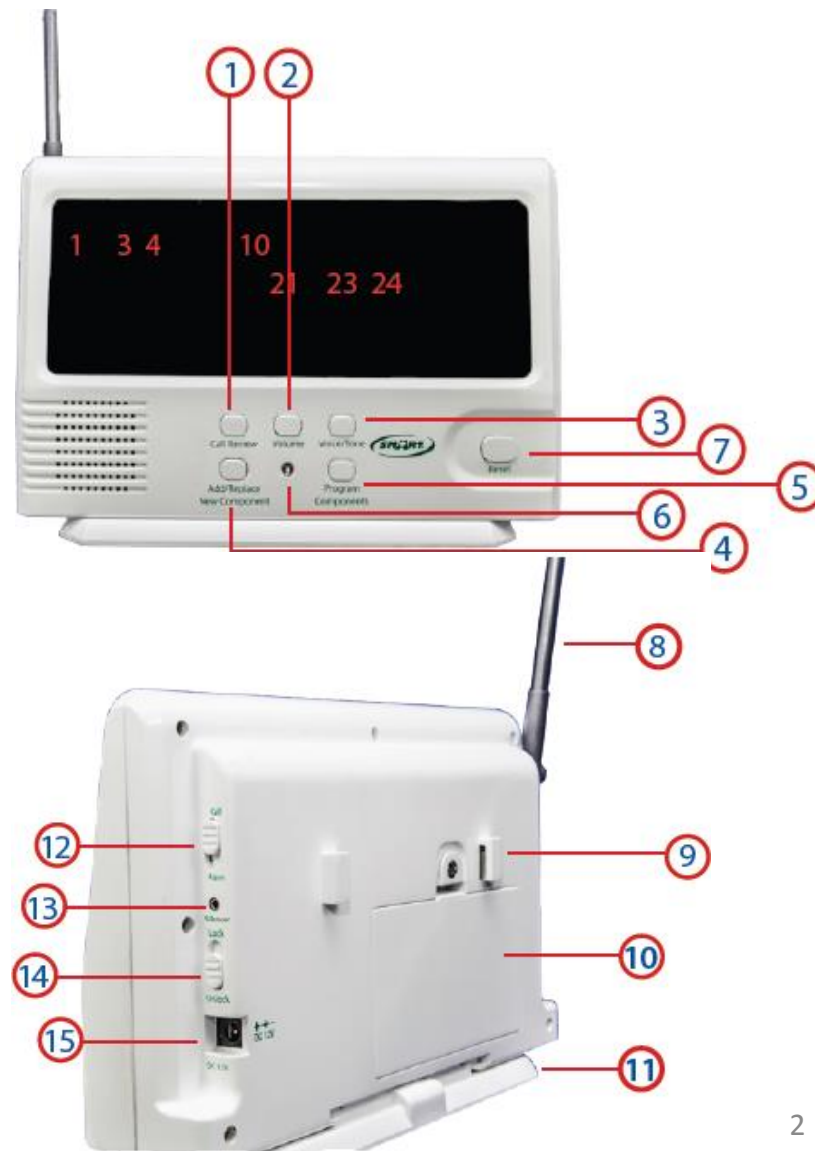



Extra Médical
1130, Rue Lévis (Suite 2)
Terrebonne, Québec.
J6W-5S6
Tel: 450-416-1753
Courriel:
info@extramedical.com

INSTRUCTIONS 433CMU-40

1) PLACER EN ORDRE LES COMPOSANTES QUE VOUS DÉSIREZ PROGRAMMER.

2) ASSUREZ-VOUS QUE LES (4) BATTERIES (C) SONT NEUVES ET FONCTIONNELLE OU BRANCHÉ AVEC L'ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE AC-04.

3) Mettre les batteries dans tous les composants, et mettre les émetteurs des coussinets ou tapis de sol à (ON).

4) Ajustement volume:

Presser sur (2) Volume, jusqu'au volume désiré relâcher le bouton.

5) Choisir une alarme:

Mettre curseur à UNLOCK (#14), Presser sur (#3) Voice/Tone, jusqu'au choix désiré, relâcher le bouton.

6) Programmer les composantes:

Presser et maintenir le bouton program components (#5), il y aura 2 Beeps, ensuite un son mélodique, attendre le son mélodique, activer la première composantes, l'unité central va afficher le numéro de la composante que vous venez de programmé, ATTENDRE LE SON MELODIQUE, continuer d'activer tous les autres composantes une après l'autres, appuyer sur RESET et remettre à LOCK (#14).

*Programmer téléavertisseur, appuyer sur RESET, aucun chiffre apparaîtra sur l'unité.

7) Ajouter composantes:

Mettre l'unité à UNLOCK (#14), presser et maintenir le bouton ADD/REPLACE, il y aura 2 Beeps, ensuite un son mélodique, presser et maintenir le bouton PROGRAM (#5), vous entendrez 1 Beep, attendre le son mélodique, CELA PEUT PRENDRE PLUSIEURS SECONDES, activer la composantes désirez. Remettre à LOCK.

8) Remplacer composantes:

Mettre l'unité à UNLOCK (#14), maintenir le bouton ADD/REPLACE, vous entendrez 2 Beeps et un son mélodique, appuyer CALL REVIEW, jusqu'au numéro que vous désirez remplacer, activer la composante, vous entendrez un son mélodique, remettre à LOCK.

Vous devez aller rapidement, activer la composante aussitôt que le numéro que désirez remplacer s'affichera.

9) Effacer mémoire unité central:

Maintenir en même temps le bouton REST ET PROGRAM COMPONENTS, tous les chiffres s'allumera, la mémoire sera effacé.

***ATTENDRE QUE L'UNITÉ SONNE 3 FOIS AVANT D'APPUYER SUR RESET DU TÉLÉAVERTISSEUR, POUR ARRÊTER L'UNITÉ.**



Extra Médical
 1130, Rue Lévis (Suite 2)
 Terrebonne, Québec.
 J6W-5S6
 Tel: 450-416-1753
 Courriel:
 info@extramedical.com

COMPOSANTES COMPATIBLES

	433-NC	Bouton d'appel (Garantie 90 jours)
	GCT-W1 GBT-W1	Coussinet de fauteuil (10x15) Coussinet de lit (20x30) (Garantie 1 an)
	433-MS	Détecteur de mouvement (Garantie 90 jours)
	FMT-03C FMT-05C FMT-07C	Tapis de sol (24x36) noir Tapis de sol (24x36) gris Tapis de sol (24x48) gris (Garantie 1 an)
	433-EXT	Détecteur de porte et fenêtre (Garantie 1 an)
	433-RB	Bouton remise en fonction (Garantie 90 jours)
	433-PRB	Téléavertisseur (Appuyer sur RESET, pour faire la programmation) (Garantie 6 mois)

***L'unité centrale est garantie 1 an.**