


# Toiles Hamac et Hamac 6

## Description

Les toiles Hamac et Hamac 6 sont des toiles conçues pour tous les transferts avec les lève-personnes au sol et les lève-personnes sur rail de type « Toile à Boucles » fabriqués par ArjoHuntleigh. La toile offre également un plus grand confort, grâce à un appui total à la tête et au cou, ainsi qu'au double revêtement dans la région des cuisses.

L'option à six courroies procure plus de sécurité pour l'usage avec des patients réfractaires ou agités. Ces toiles sont faites d'un tissu maillé qui permet le séchage rapide, ce qui les rend idéales pour le bain et pour les autres transferts.

## Toile Hamac

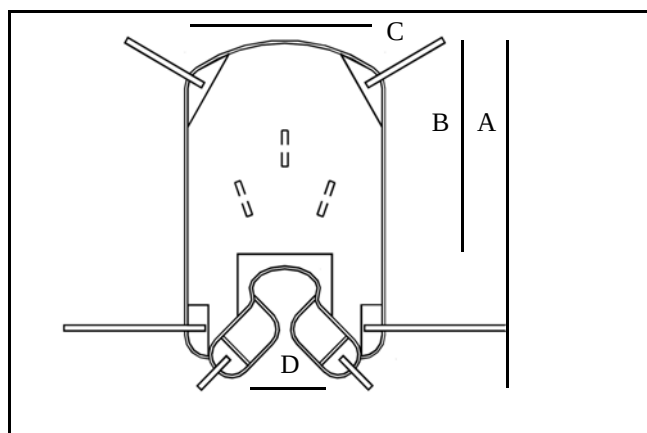

## Numéro de pièce et modèle

THAI-S - petite toile Hamac  
(recommandée pour les patients de 20 à 45 kg / 45 à 100 lb)

A: 106 cm/42 po  
B: 76 cm/30 po  
C: 66 cm/26 po  
D: 23 cm/ 9 po


THAI-M - moyenne toile Hamac  
(recommandée pour les patients de 45 à 90 kg / 100 à 200 lb)

A: 125 cm/49 po  
B: 94 cm/37 po  
C: 86 cm/34 po  
D: 28 cm/11 po

THAI-L - grande toile Hamac  
(recommandée pour les patients de 90 à 272 kg / 200 à 600 lb)

A: 145 cm/57 po  
B: 106 cm/42 po  
C: 97 cm/38 po  
D: 28 cm/11 po

## Toile Hamac 6

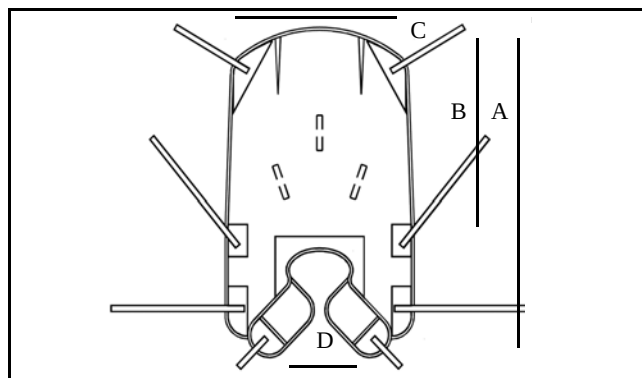

## Numéro de pièce et modèle

THA6I-XXS - Toile pédiatrique Hammock 6  
(recommandée pour les patients de moins de 20 kg / 45 lb)

A: 71 cm (28")  
B: 51 cm (20")  
C: 46 cm (18")  
D: 14 cm (6")

THA6I-XS - Toile pédiatrique Hammock 6  
(recommandée pour les patients de moins de 20 kg / 45 lb)

A: 81 cm (32")  
B: 59 cm (23")  
C: 53 cm (21")  
D: 16 cm (6.5")

THA6I-S - Petite toile Hammock 6  
(recommandée pour les patients de 20 à 45 kg / 45 à 100 lb)

A: 106 cm/42 po  
B: 76 cm/30 po  
C: 66 cm/26 po  
D: 23 cm/ 9 po

THA6I-M - Moyenne toile Hammock 6  
(recommandée pour les patients de 45 à 90 kg / 100 to 200 lb)

A: 125 cm/49 po  
B: 94 cm/37 po  
C: 86 cm/34 po  
D: 28 cm/11 po

THA6I-L - Grande toile Hammock 6  
(recommandée pour les patients de 90 à 272 kg / 200 to 600 lb)

A: 145 cm/57 po  
B: 106 cm/42 po  
C: 97 cm/38 po  
D: 28 cm/11 po

THA6I-XL - Très grande toile Hammock 6 extra large  
(recommandée pour les patients avec un poids maximale de 272 kg / 600 lb)


A: 160 cm/63 po.  
B: 124 cm/49 po  
C: 105 cm/41.5 po  
D: 28 cm/11 po

# Toiles Hamac et Hamac 6

## Positionnement de la toile


### Position assise

- 1) Alignez le centre de la toile avec la colonne vertébrale du patient. L'ouverture en U de la toile doit être placée sur le coccyx du patient. Patient allongé sur le dos

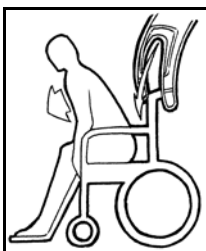


### Patient allongé sur le dos


- 1) Roulez le patient doucement sur le côté. Placez la toile pliée en deux sur le sens de la longueur sous la colonne vertébrale du patient. L'ouverture en U de la toile doit se trouver sous la base de la colonne vertébrale (le coccyx).

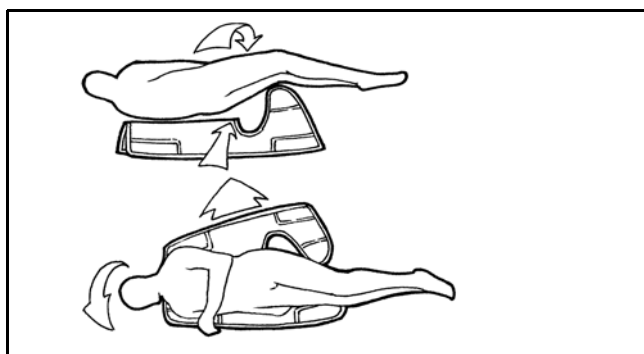



- 2) Passez les courroies les plus courtes par-dessus la hanche, puis sous les cuisses.

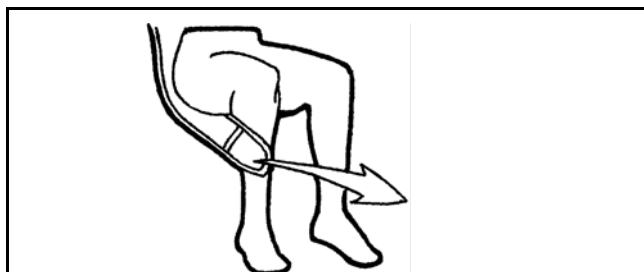

- 3) Croisez les courroies l'une par-dessus l'autre.

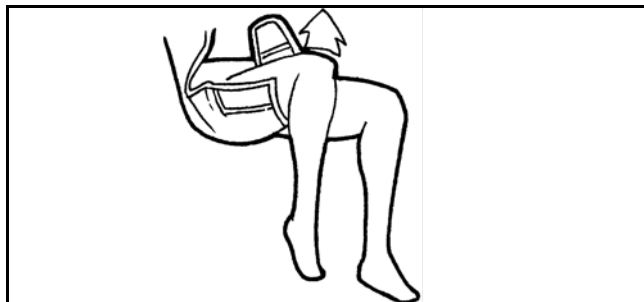


- 4) Passez les longues courroies à l'intérieur des courtes pour former un pont par-dessus les jambes du patient (option 1).

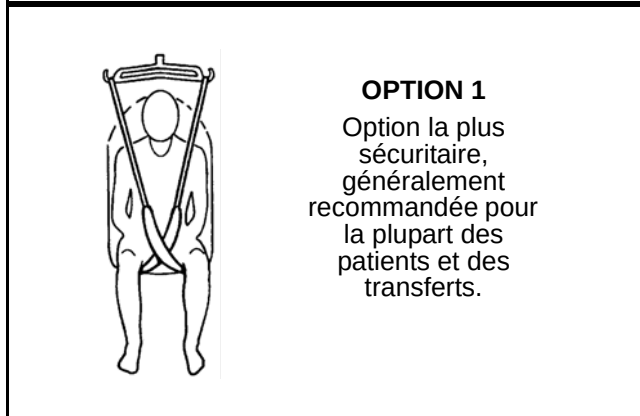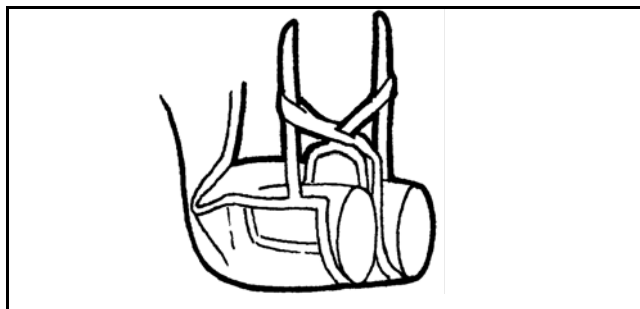

#### OPTION 1

Option la plus sécuritaire, généralement recommandée pour la plupart des patients et des transferts.

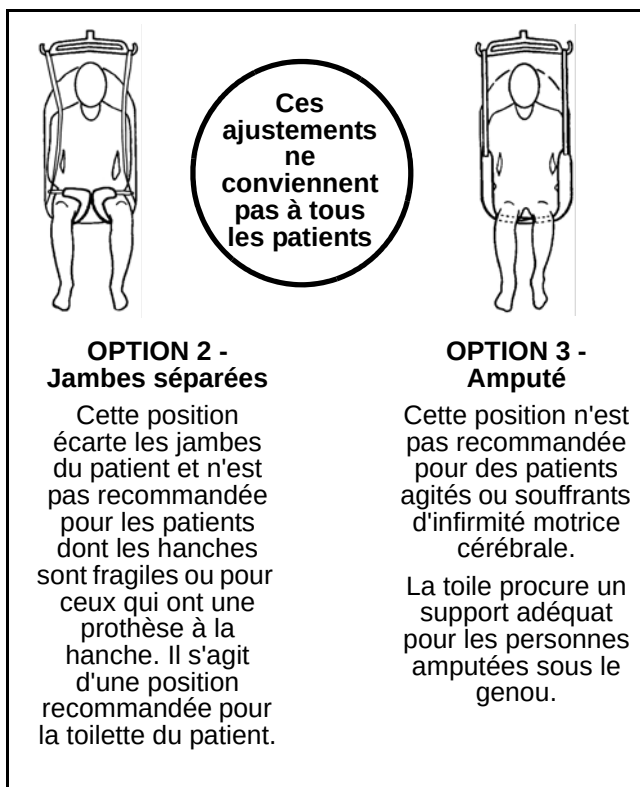

Ces ajustements ne conviennent pas à tous les patients

#### OPTION 2 - Jambes séparées

Cette position écarte les jambes du patient et n'est pas recommandée pour les patients dont les hanches sont fragiles ou pour ceux qui ont une prothèse à la hanche. Il s'agit d'une position recommandée pour la toilette du patient.

#### OPTION 3 - Amputé

Cette position n'est pas recommandée pour des patients agités ou souffrants d'infirmité motrice cérébrale.

La toile procure un support adéquat pour les personnes amputées sous le genou.

# Caractéristiques - toiles Hamac

## Caractéristiques des toiles Hamac et Hamac 6

| Caractéristiques                                                     | Avantages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tissu en polyester souple                                            | Tissu ultra souple et confortable, spécialement conçue pour durer longtemps et sécher rapidement (idéal pour les transferts au bain). Tissu facile à manipuler et à installer sur un lit.                                                                                                                                                    |
| Section pour les jambes en nylon/ polyester ultra souple             | Empêche les irritations cutanées causées au patient et s'installe facilement sur un patient déjà assis, puisque le patient n'a pas à s'asseoir sur la toile.                                                                                                                                                                                 |
| Courroies solides en nylon/ polyester avec boucles de positionnement | Permet différentes positions (position assise, semi-inclinée, ou inclinée) et de plus grandes possibilités d'ajustements.                                                                                                                                                                                                                    |
| Renfort pour faciliter la répartition du poids                       | Distribue également le poids dans la toile, aucun point de pression ou de pincement.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Courroie spécialement conçue pour les jambes                         | Assure la sécurité des patients, même lorsque ceux-ci sont agités. Position des jambes ajustable.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Support pour la tête                                                 | Idéal pour la plupart des transferts (environ 80%), puisqu'il offre un support complet au patient.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poignées de positionnement                                           | Les poignées permettent le déplacement des patients d'une position à une autre et le positionnement adéquat d'un patient dans une chaise, sans avoir à faire d'ajustements. Les transferts d'une position inclinée à une position assise sont faciles et rapides. La poignée permet au préposé de pivoter le patient de manière sécuritaire. |
| Charge d'utilisation maximale de 272 kg (600 lb)                     | Solide et durable, la toile assure la sécurité du patient.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toile faite d'une seule pièce de tissu solide                        | La peau n'est pas irritée par les coutures. Augmente la sécurité du patient et la solidité de la toile.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lavable à la machine                                                 | Simple à entretenir et à nettoyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tailles XXS, XS, S, M, L, XL                                         | La taille moyenne convient à la plupart des patients. Les petites toiles s'adaptent à la clientèle pédiatrique et les grandes toiles conviennent aux patients les plus corpulents.                                                                                                                                                           |

## Caractéristiques supplémentaires de la toile Hamac 6

| Caractéristiques                      | Avantages                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courroies supplémentaires aux hanches | Augmente le sentiment de sécurité du patient et empêche les chutes latérales. Peu convenir au transfert de patients en orthopédie. |
| Support supplémentaire à la tête      | Offre un soutien supplémentaire à la tête et au haut du corps.                                                                     |