


TOILE ENVELOPPANTE #620

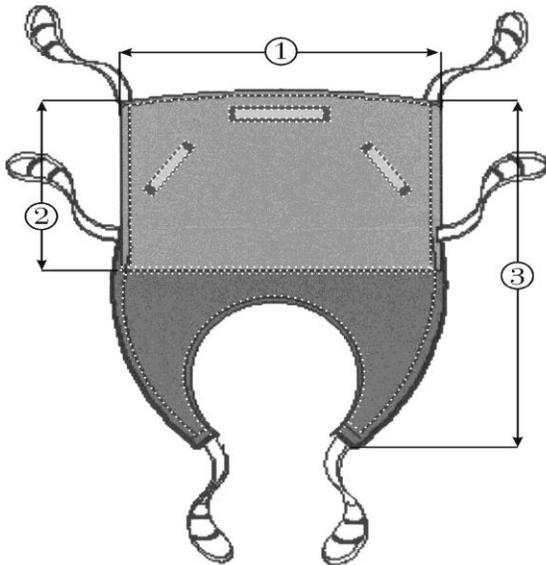

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES		
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)
EXTRA PETIT	LILAS	35/87.5	21.5/53.75	40/100
PETIT	ROUGE	37/92,5	22.5/56.25	40.5/101.25
MOYEN	VERT	39/97.5	24/60	42.5/106.25
GRAND	JAUNE	41/102.5	25/62.5	45.5/113.75
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	43/107.5	26/65	46/115

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la toile.

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à **bas**se température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins trois minutes.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSION. NE PAS TORDRE LE TISSU.



Ne pas repasser.