


TOILE DOUBLE CUISS. #690 APPUI-TÊTE INTÉGRÉ

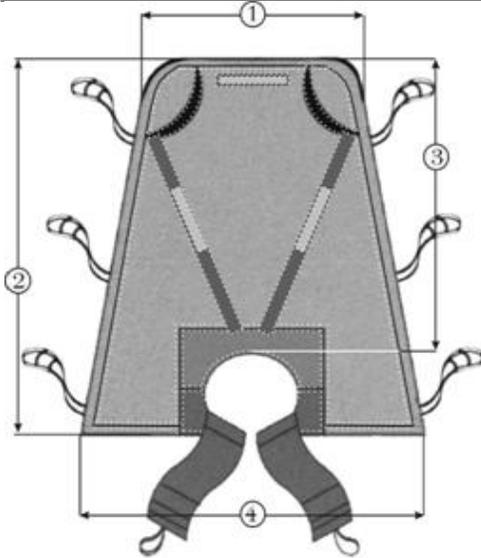

GRANDEUR DE LA TOILE COULEUR 1 ^{ER} CROCHET		DIMENSIONS APPROXIMATIVES			
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)	4 (pce/cm)
X-PETIT LILAS	HAUT TÊTE ÉPAULE	17/42.5 25/62.5	42/105	30/75	31/77.5
PETIT ROUGE	HAUT TÊTE ÉPAULE	18/45 27/67.5	44/110	32/80	33/82.5
MOYEN VERT	HAUT TÊTE ÉPAULE	18.5/46.25 28/70	47/117.5	34/85	34/85
GRAND JAUNE	HAUT TÊTE ÉPAULE	20.5/51.25 30/75	49/122.5	36/90	37/92,5
EXTRA GRAND BLEU ROYAL	HAUT TÊTE ÉPAULE	21.5/53.75 31/77.5	49/122.5	38/95	41/102,5

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins **trois minutes**.

 Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.

 Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSIION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSIION. NE PAS TORDRE LE TISSU.

 Ne pas repasser.