


DOUBLE CUISSARDE #3624 APPUI-TÊTE INTÉGRÉ

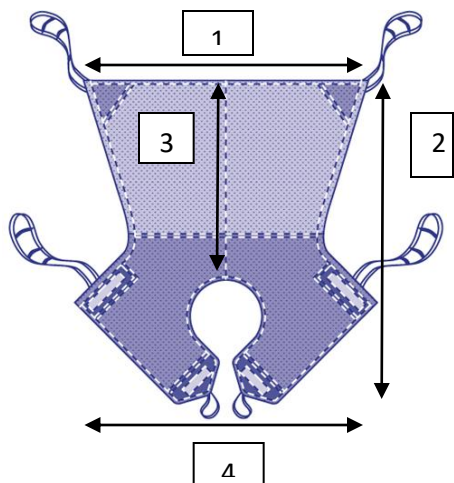

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES			
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)	4 (pce/cm)
EXTRA PETIT	BLEU MARIN	25/62.5	43/107.5	27/67.5	37/92.5
PETIT	ROUGE	28/70	48/120	30/75	42/105
MOYEN	VERT	30/75	51/127.5	32/80	44/110
GRAND	JAUNE	32/80	52/130	34/85	44/110
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	33/82.5	56/140	35/87.5	48/120

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSIION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSIION. NE PAS TORDRE LE TISSU.



Ne pas repasser.