



- 3- Pousser et maintenir le levier à nouveau;
- 4- Déplacer le côté vers le bas avec un mouvement de rotation jusqu'au deuxième palier.

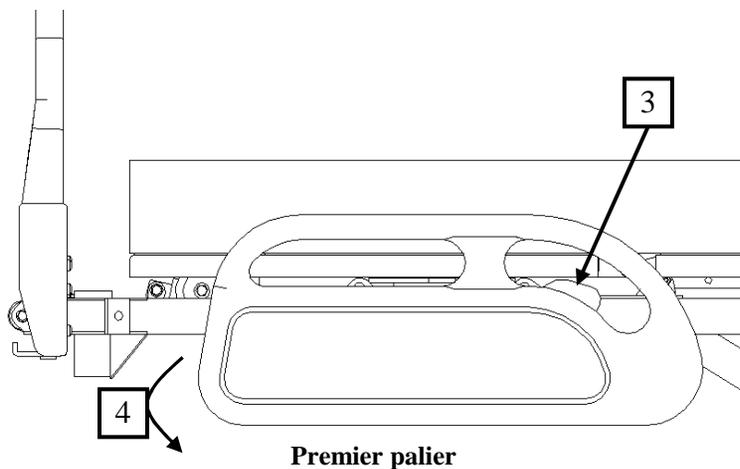

Pour remettre en position haute :

- Tirer vers le haut avec un mouvement de rotation pour le remonter;
- S'assurer que le côté est bien verrouillé en tentant de le déplacer longitudinalement.

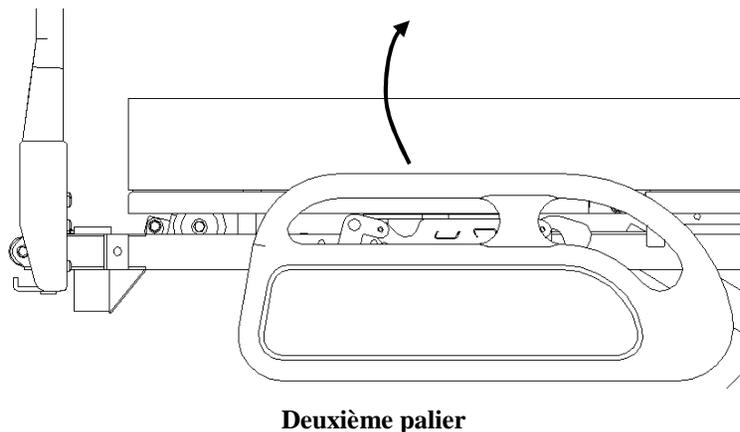


Attention! Veiller à ce que rien ne puisse entraver le mouvement des côtés de lit (couvertures, membres du patient, etc.) avant de les actionner.

Feuillet d'instructions

Côté de lit demi-section Rotec pivotant
(RDRTG2-28-MT8, RDRTG2-28-MTBNQ, RDRTG2-28-V)

Pour lits Multitech 8, Multitech BNQ & Varitech

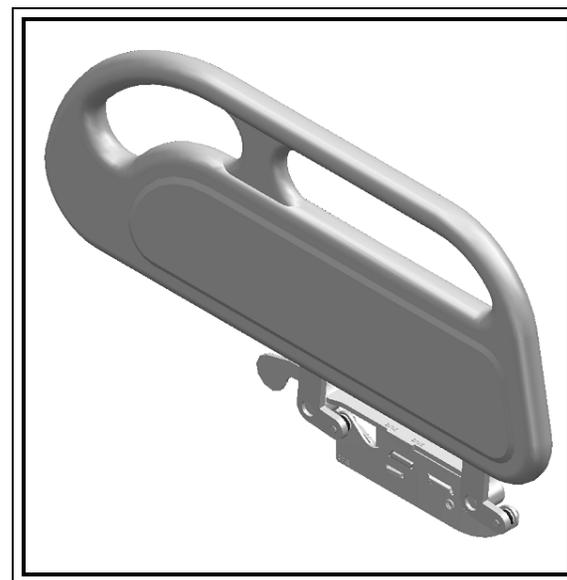

ROTEC
INTERNATIONAL
LITS AJUSTABLES

Conserver ce feuillet et l'insérer dans le manuel de l'utilisateur
Ne pas installer ni utiliser les accessoires sans avoir préalablement lu ce feuillet au complet. Veuillez suivre ces instructions. Rotec International ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par la négligence ou un usage inapproprié de nos produits. Les illustrations sont uniquement à titre indicatif.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIÈCES

☎ (450) 783-6444

💻 info@rotecbeds.com


✉ 125, rue de l'Église, Baie-du-Febvre, Qc, J0G 1A0

Installation du côté de lit demi-section Rotec pivotant Pour lits Multitech 8, Multitech BNQ & Varitech



- Matériel requis : Clé 1/2

Note : Si votre lit est équipé de butées latérales, veuillez dévisser et enlever celles vis-à-vis les côtés de lit.

Actionner les côtés afin de déterminer leur sens de rotation. Ensuite, placer les côtés selon le schéma suivant.

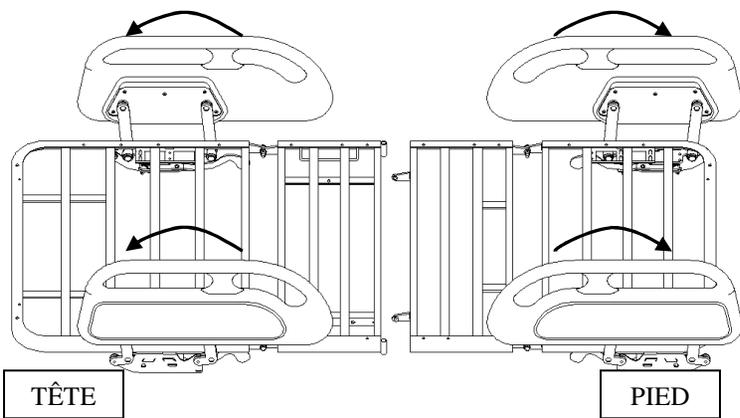


- 1- Placer les côtés en dessous de la plate-forme et aligner les quatre trous tel qu'indiqué.
- 2- Placer les rondelles ressorts et bien fixer les quatre (4) boulons (par côté).

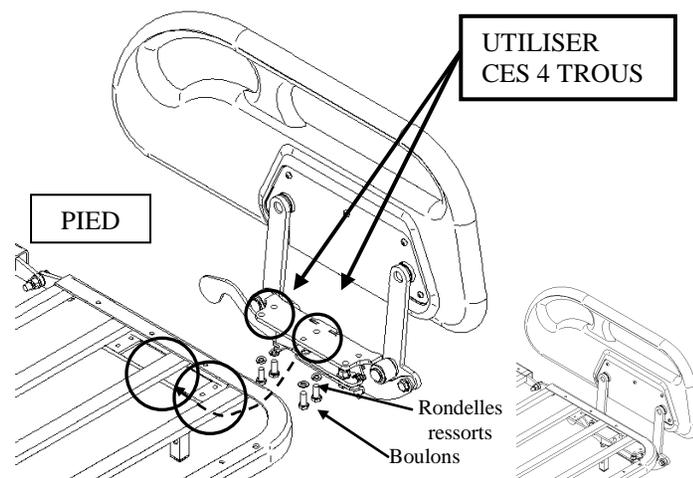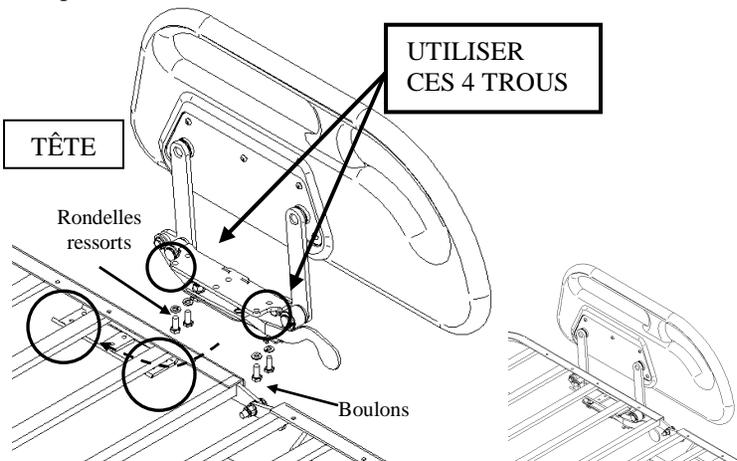

Instructions pour baisser le côté de lit

- 1- Pousser le levier situé en dessous du côté de lit, et le maintenir;
- 2- Déplacer le côté de lit vers le bas avec un mouvement de rotation. Pour accroître la sécurité, le côté se bloque peu après l'avoir actionné. Appuyer de nouveau sur le levier et déplacer le côté jusqu'à ce qu'il s'arrête au premier palier.

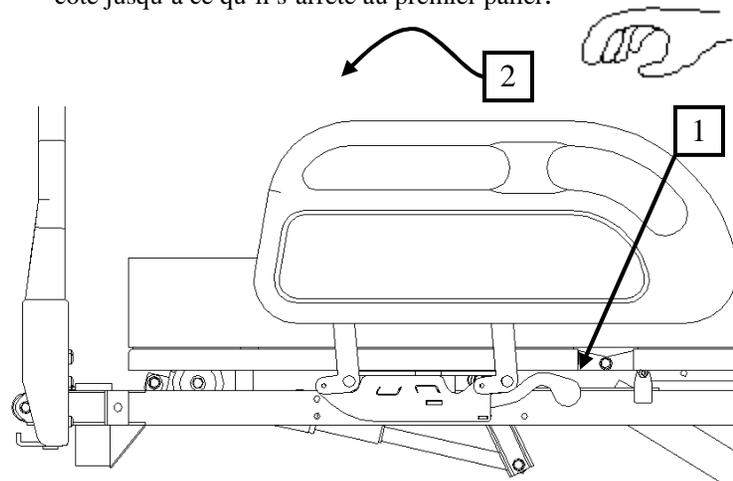

Position haute