


Description

Cette toile, qui aide les patients à se tenir debout, est idéale pour l'entraînement à la marche, à l'équilibre, et est sécuritaire pour les préposés et les infirmières de réhabilitation. Elle peut offrir un soutien complet ou partiel pendant les exercices de marche. Les utilisateurs doivent pouvoir soutenir leur poids.

La toile de marche convient à tous les modèles de lève-personnes sur rail. Ne l'utilisez pas sur un patient qui ne peut pas soutenir son corps et qui n'a pas de tonus musculaire aux épaules et au cou.

Toile de marche

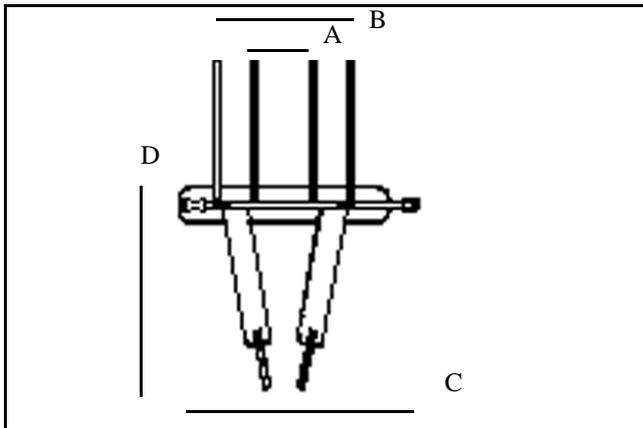

Numéro de pièce et modèle

TEM-S - petite toile de marche
(recommandée pour les patients de 20 à 45 kg /
45 à 100 lb)

A: 25 cm/10 po
B: 50 cm/20 po
C: 89 cm/35 po
D: 76 cm/ 30 po

TEM-M - moyenne toile de marche
(recommandée pour les patients de 45 à 90 kg /
100 à 200 lb)


A: 30 cm/12 po
B: 68 cm/27 po
C: 106 cm/42 po
D: 91 cm/36 po

TEM-L - grande toile de marche (recommandée
pour les patients de 90 à 200 kg / 200 à 440 lb)

A: 30 cm/12 po
B: 86 cm/34 po
C: 124 cm/49 po
D: 112 cm/44 po

Installation de la toile de marche

- 1) Placez la portion blanche à côté du patient. Les étiquettes et les courroies extérieures doivent se trouver à l'extérieur.
- 2) Inclinez le patient vers l'avant dans le fauteuil et veillez à ce que le patient soit supporté.
- 3) Installez la toile autour de la cage thoracique du patient, attachez la boucle de la ceinture et ajustez la toile au moyen des courroies de la ceinture.
- 4) Les deux parties de la toile destinées aux jambes retombent de chaque côté vers le bas. Glissez un panneau sous la jambe gauche et un autre sous la jambe droite.
- 5) Enfilez la courroie thoracique droite dans la courroie de la jambe droite. Enfilez la courroie thoracique gauche dans la courroie de la jambe gauche.
- 6) Les bras doivent toujours se trouver entre les courroies de la cage thoracique et les courroies arrière.
- 7) Pour assurer une bonne posture au patient, ajustez la hauteur de toutes les courroies qui inclinent le corps du patient jusqu'à ce que celui-ci soit installé confortablement.
- 8) Vous devez installer la toile en utilisant la même couleur de boucle pour les deux courroies arrière des épaules et les deux courroies de la cage thoracique.
- 9) Assurez-vous que la toile ne s'accroche nulle part (dans les freins ou la poignée du fauteuil roulant, ou à d'autres endroits) et que les sections de la toile qui passent entre les jambes offrent un support confortable. Sinon, réinstallez la toile en utilisant une boucle plus basse (grise ou noire).

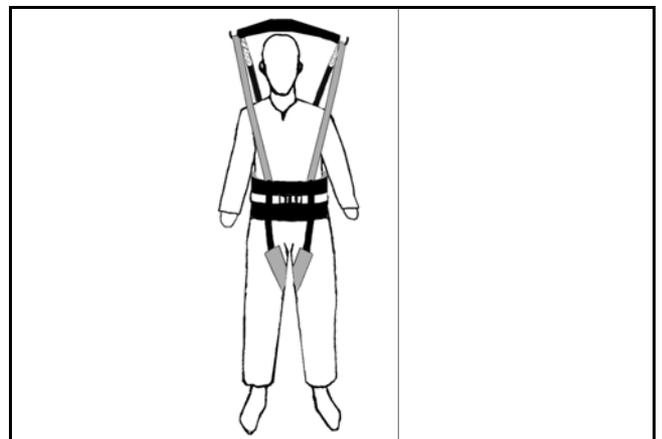

Caractéristiques - toile de marche

Caractéristiques de la toile de marche

Caractéristiques	Avantages
Bande de taille et courroies pour les jambes	Idéal pour les exercices de réhabilitation. Les courroies étroites et rembourrées supportent les jambes et permettent au patient de marcher en toute sécurité parce qu'il est entièrement soutenu.
Polyester capitonné et piqué de polyester	Tissu ultra-doux spécialement choisi pour sa résistance. La toile offre plus de confort au patient et son tissu peut être déplacé facilement.
Bande de taille et ceinture rembourrées	Facile à installer sur un patient assis. Le rembourrage additionnel à la taille accroît le confort du patient.
Courroies solides en nylon/ polyester avec boucles de positionnement	Les patients peuvent être positionnés soit vers l'avant, au centre ou légèrement vers l'arrière. Les courroies ajustables conviennent aux patients qui ont une grande cage thoracique et permettent des ajustements selon la morphologie des patients.
Courroie spécialement conçue pour les jambes	Assure la sécurité des patients, même lorsque ceux-ci sont agités. Position des jambes ajustable.
Charge d'utilisation maximale de 200 kg (440 lb)	Solide et durable, la toile assure la sécurité du patient.
Lavable à la machine	Simple à entretenir et à nettoyer.