



Instructions pour pivoter la barre d'appui

- Tirer vers le haut et faire pivoter vers l'extérieur du lit.

Attention! Si la barre pivote vers l'intérieur du lit, l'installation est incorrecte et peut causer des blessures à l'utilisateur. Il faut alors recommencer l'installation de la barre d'appui;

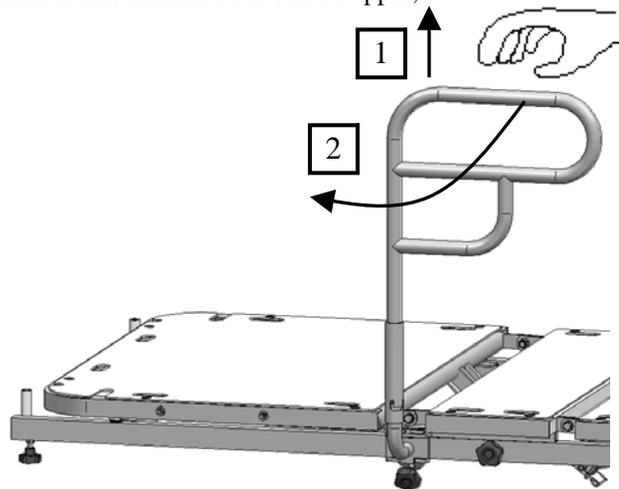

Fermé

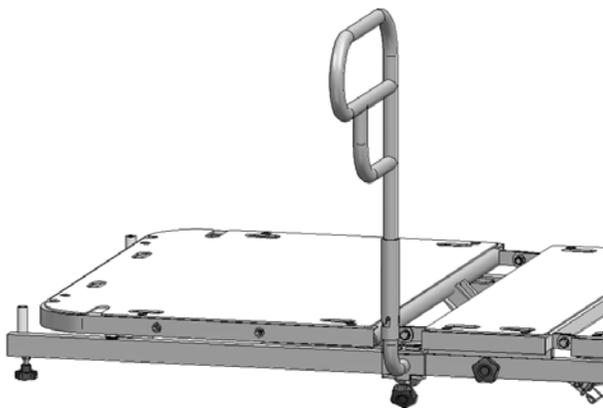

Ouvert


Pour remettre en position fermée :

- Tirer vers le haut et faire pivoter vers l'intérieur du lit.
- S'assurer que la barre d'appui est bien verrouillée en tentant de la faire pivoter.

Feuille d'instructions

Barre d'appui Rotec à positions multiples
(BAPM-R-MT36 & BAPM-R-MT39)

Pour lit Multi-tech

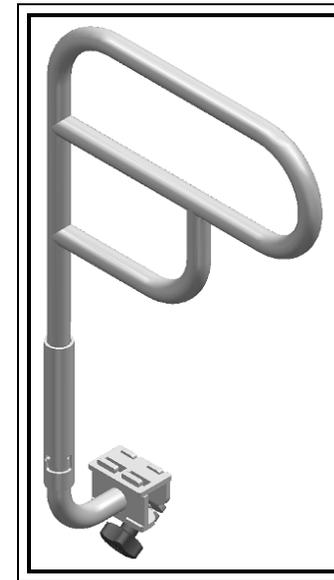

ROTEC
INTERNATIONAL
LITS AJUSTABLES

Conserver ce feuillet et l'insérer dans le manuel de l'utilisateur
Ne pas installer ni utiliser les accessoires sans avoir préalablement lu ce feuillet au complet. Veuillez suivre ces instructions. Rotec International ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par la négligence ou un usage inapproprié de nos produits. Les illustrations sont uniquement à titre indicatif.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PIÈCES

☎ (450) 783-6444

✉ info@rotecbeds.com

✉ 125, rue de l'Église, Baie-du-Febvre, Qc, J0G 1A0


Installation de la barre d'appui

Pour le lit Multi-tech


- Matériel requis : Aucun

IMPORTANT : Si votre lit est équipé de côtés de lit, vous devez les enlever avant l'installation de la barre d'appui. Aucun côté de lit ne peut être installé avec la barre d'appui.


Placer la barre selon le schéma suivant.

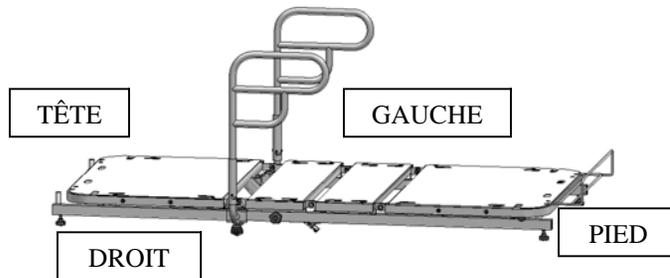



1- Dévisser la poignée pour séparer les deux (2) parties de la barre;

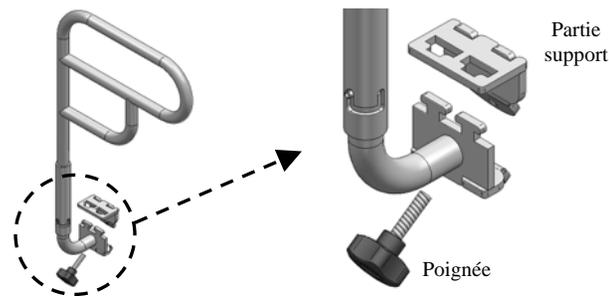

2- Monter le lit à son plus haut. Placer la partie support de la barre au-dessus de la structure, en dessous du joint entre la tête et la fesse de la plate-forme, tel qu'indiqué;

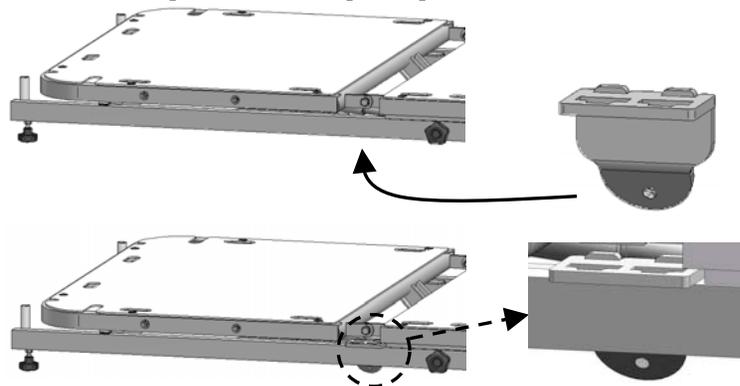

3- Installer la barre et insérer les deux (2) dents dans les trous de la partie support. Pour faciliter cette opération, lever un peu la partie support et insérer la barre en lui donnant un angle;

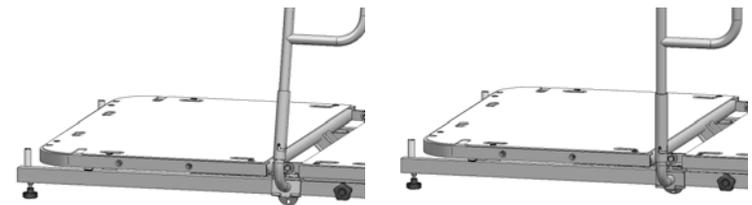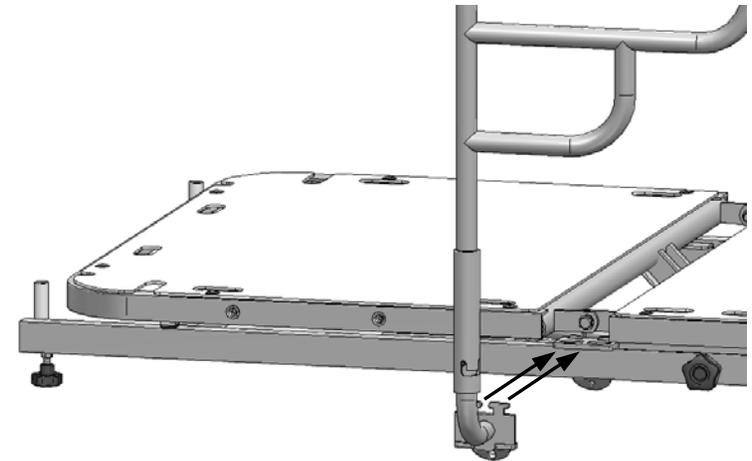

4- Insérer la poignée et la visser.

