


TOILE HAMAC #610

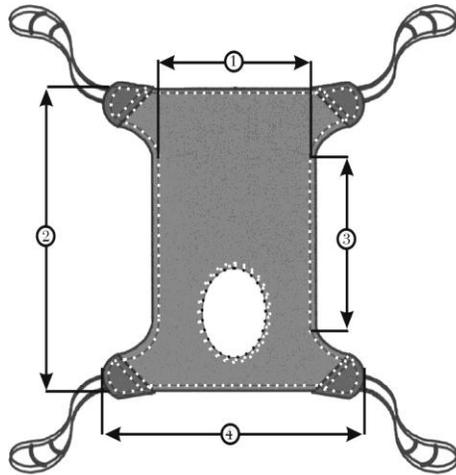

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES			
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)	4 (pce/cm)
EXTRA PETIT	BLEU MARIN	17/42.5	35.5/89	22.5/56.25	30/75
PETIT	ROUGE	20/50	36/90	23/57.5	33/82.5
MOYEN	VERT	21.5/53.75	38/95	24.5/61.25	35/88
GRAND	JAUNE	23/57.5	41/102.5	26/65	37/92,5
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	25/62.5	42/105	27/67.5	39/97,5

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSIION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSIION. NE PAS TORDRE LE TISSU.



Ne pas repasser.