

moVo

evolution



BROME

MD CE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. LE QUADRIPORTEUR

Avant d'essayer de conduire ce quadriporteur par vous-même, il est important que vous vous familiarisiez avec les commandes et comment les utiliser.

Usage prévu : Les quadriporteurs Movo offrent un moyen par lequel un occupant handicapé c'est-à-dire une personne handicapée ou une personne n'ayant pas la pleine capacité de marcher sans aide pour avoir la mobilité et la liberté de voyager.

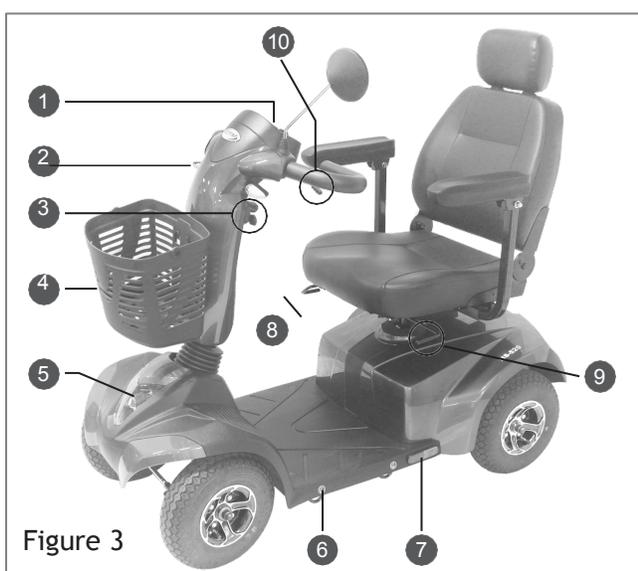


Figure 3

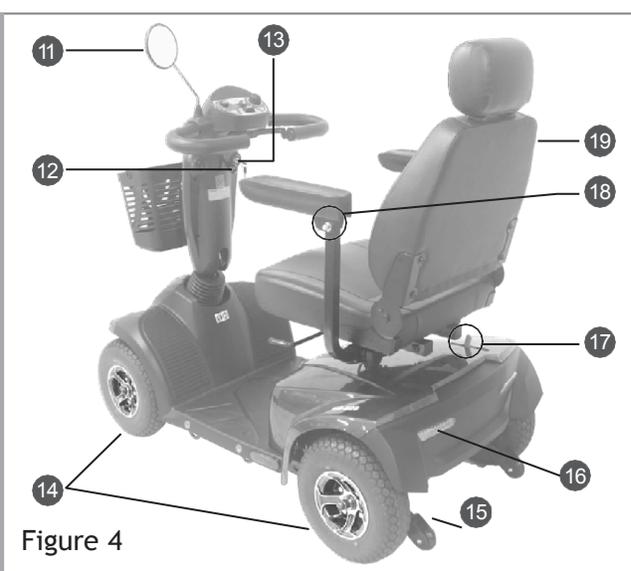


Figure 4

NO	ITEM	NO	ITEM
01	Panneau de commande	11	Rétroviseur
02	Clignotant avant	12	Réglage de l'angle de barre
03	Port de chargement	13	Interrupteur à clé
04	Panier avant	14	Roues avant/arrière
05	Lumière avant	15	Anti-bascule
06	Crochet d'arrimage	16	Feu arrière/clignotant arrière/ lumière frein
07	Réflecteur		
08	Levier de réglage du siège	17	Levier N-D
09	Levier de pivotement du siège	18	Accoudoir réglable (largeur)
10	Accélérateur	19	Siège du capitaine

2. PANNEAU DE COMMANDE

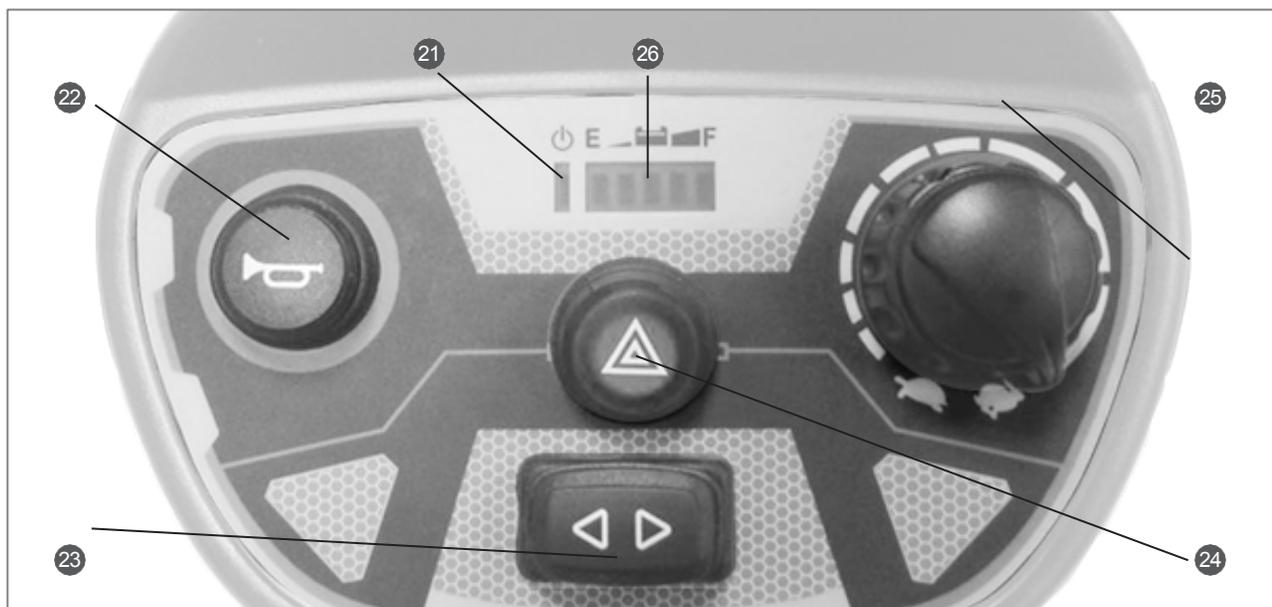


Figure 5 - Brome Panneau de Commande

NO.	ITEM	FONCTION
21	Indicateur d'alimentation/d'autodiagnostic	Mise sous tension / Code d'erreur
22	Klaxon	Appuyez pour le son d'avertissement
23	Clignotants	Allumer pour tourner à gauche/ droite
24	Feux d'urgence clignotants	Appuyez sur pour les clignotants d'urgences
25	contrôle de vitesse	Ajuster la vitesse du quadriporteur
26	Jauge de batterie	Affichage de la charge de la batterie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur totale	1200 mm / 47.2"
Largeur	640 mm / 25.2"
Hauteur	1155 mm / 45.5"
Roues avant	290 mm / 11"
Roues arrière	290 mm / 11"
Poids w/ batteries	94 kg / 208 lbs
Vitesse Max.	13 kmph / 8 mph
Capacité de charge	136 kg / 300 lbs
Distance du sol	65 mm / 2.6"
Angle de grimpe	10 degree
Obstacle max.	70 mm / 2.8"
Rayon de braquage	1400 mm / 55.1"
Suspension	Avant & Arrière
Frein	Électro-Mécanique
Siège	Dossier mi-hauteur pivotant avec appuie-tête et mécanisme de glissement du siège
Largeur du siège	465 mm / 18.3"
Moteur	700W, 4500 r.p.m
Batteries	(2) 12V. 50Ah
Poids des batteries	30.5 kg / 67.2 lbs
Autonomie	40 km / 23 Miles
Chargeur	5A Off Board

LA GARANTIE MOVO

Les produits Movo sont conçus pour offrir une qualité et une performance excellentes. Pour toute réclamation de garantie justifiée sur un item jugé défectueux par les deux parties, Movo s'engage à sa discrétion à remplacer, réparer ou rembourser l'item jugé défectueux. La garantie débute à la réception du produit par le client. Tout dommage ou défaut causé par un mauvais usage du produit n'est pas couvert par la garantie.

- Châssis : garantie limitée de deux ans.
- Contrôleur : garantie limitée d'un an.
- Composantes électroniques (y compris le moteur) et chargeur : garantie limitée d'un an.

Exclus de la garantie

- Brosses du moteur
- Pneus
- Accoudoirs
- Coussin de siège
- Fusibles et ampoules
- Recouvrement de la barre
- Revêtements avant et arrière
- Batteries au lithium
- Batteries et pièces consommables



info@moevolution.com
Tél.: [1-888-480-MOVO](tel:1-888-480-MOVO) (6686)

Granby, Québec
Canada