

moVo


evolution




SUTTON

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. LE QUADRIPORTEUR

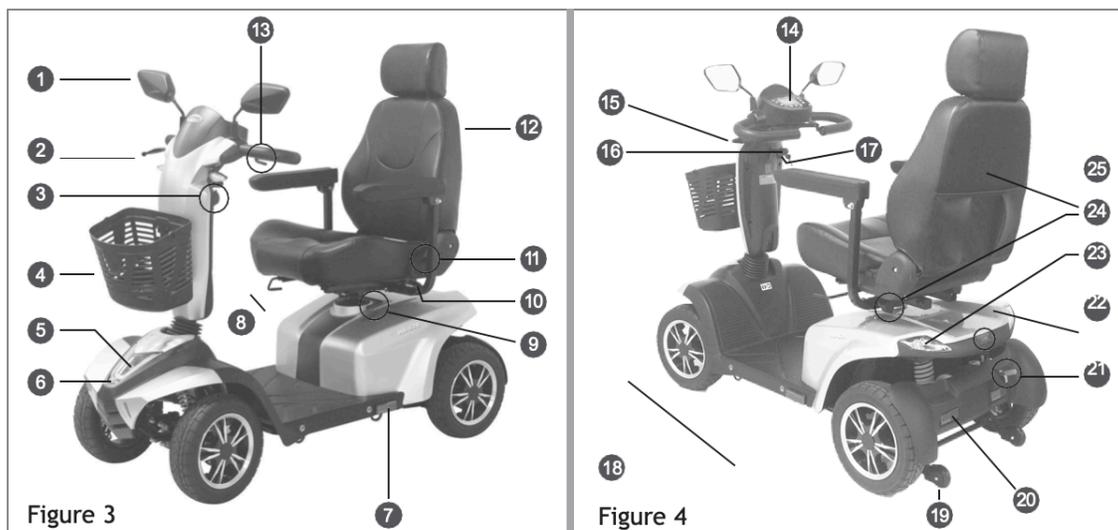

NO	ITEM	NO	ITEM
01	Rétroviseur	14	Panneau de commande
02	Frein à main	15	Clignotant avant
03	Tiller Angle Adjustment Lever	16	Port de chargement
04	Panier Avant	17	Interrupteur à clé
05	Lumière avant	18	Crochet d'arrimage
06	Lumière décorative	19	Anti-bascule
07	Réflacteur	20	Réflacteur
08	Levier de réglage du siège	21	Levier N-D
09	Levier de pivotement du siège	22	Lumière de freinage
10	Réglage de largeur d'accoudoir	23	Feu arrière/clignotant arrière/lumière frein
11	Levier de réglage de l'angle du dossier du siège	24	Accoudoir réglable
12	Siège de luxe		
13	Accélérateur	25	Poche arrière

2. PANNEAU DE COMMANDE

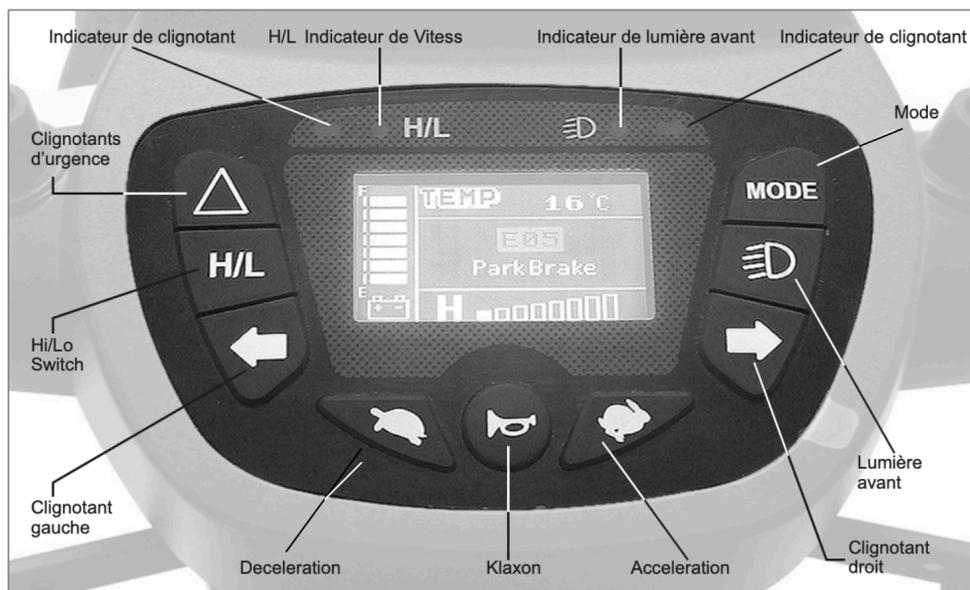


Figure 5 - Sutton Panneau de Commande

	Feux de d'urgence	Appuyez une fois sur le bouton des feux de d'urgence pour allumer, appuyez à nouveau pour éteindre
H/L	Hi/Lo	Mode haut vitesse/basse vitesse
	Clignotant gauche	Appuyez une fois sur le bouton des clignotants pour allumer, appuyez à nouveau pour éteindre (s'éteint automatiquement après 30 secondes)
	Clignotant droit	Appuyez une fois sur le bouton des clignotants pour allumer, appuyez à nouveau pour éteindre (s'éteint automatiquement après 30 secondes)
	Deceleration	Appuyez une fois sur le bouton de basse vitesse pour diminuer la vitesse, la vitesse minimale est de 1
	Acceleration	Appuyez une fois sur le bouton d'accélération pour augmenter la vitesse, la vitesse maximale est de 8
	Klaxon	Appuyez une fois sur le bouton du klaxon pour faire retentir la tonalité d'avertissement si nécessaire.
	Lumière avant	Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lumière avant et les feux arrière.
MODE	Réglage	Appuyez sur le bouton de réglage pour définir un mode différent.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur totale	1400 mm / 55.1"
Largeur	680 mm / 26.8"
Hauteur	1325 mm / 52.2"
Roues avant	330 mm / 13"
Roues arrière	330 mm / 13"
Poids w/ batteries	142 kg / 313 lbs
Vitesse Max.	15 kmph / 9.3 mph
Capacité de charge	160 kg / 350 lbs
Distance du sol	90 mm / 3.5"
Angle de grimpe	10 degree
Obstacle max.	100 mm / 3.9"
Rayon de braquage	1660 mm / 65.4"
Suspension	Avant & arrière
Frein	Frein à main et
Siège	Siège capitaine pivotant avec mécanisme de glissement du siège et réglage de l'angle du dossier
Largeur du siège	515 mm / 20.3"
Moteur	850W, 5000 r.p.m
Batteries	(2) 12V. 75Ah
Poids des batteries	50 kg / 110 lbs
Autonomie	50 km / 31 Miles
Chargeur	8A Off Board

LA GARANTIE MOVO

Les produits Movo sont conçus pour offrir une qualité et une performance excellentes. Pour toute réclamation de garantie justifiée sur un item jugé défectueux par les deux parties, Movo s'engage à sa discrétion à remplacer, réparer ou rembourser l'item jugé défectueux. La garantie débute à la réception du produit par le client. Tout dommage ou défaut causé par un mauvais usage du produit n'est pas couvert par la garantie.

- Châssis : garantie limitée de deux ans.
- Contrôleur : garantie limitée d'un an.
- Composantes électroniques (y compris le moteur) et chargeur : garantie limitée d'un an.

Exclus de la garantie

- Brosses du moteur
- Pneus
- Accoudoirs
- Coussin de siège
- Fusibles et ampoules
- Recouvrement de la barre
- Revêtements avant et arrière
- Batteries au lithium
- Batteries et pièces consommables



info@moevolution.com
Tél.: 1-888-480-MOVO (6686)

Granby, Québec
Canada