



Extra Médical

1130, rue Lévis (Suite 2)
Terrebonne, Québec. J6W-5S6
Tel: 450-4161753
Courriel: info@extramedical.com

EXTRAmédical

PPB-W1

COUSSINET DE LIT AVEC FIL



Coussinet de lit avec fil 20" x 30" , s'assurer que le moniteur auquel le coussinet sera branché est fonctionnel.

Insérer la fiche téléphonique du coussinet à la base du moniteur et s'assurer que l'autre extrémité du fil est connecté fermement dans le sens de la flèche.

Placer le coussinet de lit sous la literie du matelas, au niveau des épaules/dos.

Si le coussinet est utilisé dans des cas d'errance il peut-être installé au niveau des fesses.

Il est recommandé d'utiliser les pincettes (clips) avec élastiques pour coussinets (BCS-04) afin de maintenir le coussinet en place et d'éviter les faux plis.

S'assurer avant le début de chaque quart de travail que le coussinet est bien positionné dans le lit et qu'il ne présente aucun faux pli ou déchirure.

Ne pas immerger le coussinet dans aucun liquide, ne pas le plier.

Évitez d'exposer le coussinet a des chaleurs extrêmes.

Nettoyer le coussinet avec une lingette désinfectante ou un nettoyeur antibactérien.

Pour minimiser les risques d'infections, il est recommandé d'utiliser un coussinet neuf pour chaque patient.

Par mesure de sécurité, il est recommandé de remplacer le coussinet quand la durée de vie est atteinte (1 ans).

**Extra Médical**

1130, rue Lévis (Suite 2)
Terrebonne, Québec. J6W-5S6
Tel: 450-4161753
Courriel: info@extramedical.com

EXTRAmédical**PPB-W1****COUSSINET DE LIT AVEC FIL**

Tous les coussinets (Smart Caregiver) qui sont expédiés sont identifiés au crayon feutre noir (Entre Parenthèse), soit par le numéro de bon de commande de l'établissement ou la date de l'achat.

À la première utilisation des coussinets, le client doit inscrire la date de la première utilisation.

Start Date	End Date

La garantie commence à la première utilisation.

Si le coussinet n'a aucune date du début de l'utilisation d'inscrit sur le coussinet, la garantie commencera dans ce cas à partir de la date de l'achat.

Vérifier sur une base journalière les coussinets, afin qu'ils soient bien en place et fonctionnel.

La garantie ne couvre pas les faux plis, considéré comme une mauvaise utilisation.

Mise en garde

Le fait de ne pas se conformer à la mise en garde peut mener à des accidents pouvant aller jusqu'au décès .

Ce dispositif ne convient pas à tous les individus, d'autres dispositifs pourraient être nécessaire. Ce dispositif ne peut pallier à une surveillance visuelle, d'aucune manière ce dispositif n'empêchera les chutes et/ou les fugues.

Avis Légal

Tous les produits (Smart Caregiver) sont conçus pour être installés par l'utilisateur. De ce fait il incombe entièrement à l'utilisateur de s'assurer que l'installation ainsi que les vérifications soient conformes. Ce dispositif n'a pas pour but de remplacer une supervision du personnel. Il nécessite en plus et sans se limiter à;

Une supervision du patient

Une formation adéquate du personnel.

Une vérification des produits avant chaque utilisation.