

Instruction pour installation



ExtraMedical

450-416-1753

www.extramedical.com

Instruction pour installation



TL-2109V Système de ceinture de surveillance

TL-2109V Système de ceinture de surveillance



TL-2109V Système de ceinture de sécurité.

La ceinture de surveillance réduit les risques de chute en donnant l'alarme quand le patient se détache. Quand la ceinture est détaché l'alarme retenti et le personnel soignant peut apporter de l'aide au patient. La série de moniteur TL-2100 de gestion de chute est utilisé pour la ceinture de fauteuil. La boucle a détachement rapide ou avec Velcro, la courroie préserve la liberté de mouvement du résidant en n'agissant pas comme une contrainte. Les embouts renforcés de métal de la ceinture de fauteuil rendent l'installation facile et sécuritaire. La ceinture est ajustable jusqu'à 54 pouces et pour une grandeur surdimensionné une commande spécial peut être faite. La ceinture de sécurité pour fauteuil possède une garantie de un (1) an.

TL-2109V Contenu de l'emballage

- Dégagement rapide à un doigt ou à ceinture Velcro
- Ceinture ajustable 54 pouces.
- Renforcement métallique aux embouts pour installation sécuritaire.

TL-2109V Accessoires optionnel (vendu séparément)

- Moniteur de gestion de chute économique (TL-2100E)
- Moniteur de gestion de chute automatique (TL-2100S)
- Moniteur de gestion de chute a enregistrement (TL-2100V)
- Moniteur de gestion de chute pour (pad à minuterie) TL-2100CP

Instruction rapide pour installation

Step 1

Installation de la ceinture de fauteuil


- Dévisser la vis de chaque côté qui retient le siège du fauteuil en place.
- Passer la vis dans le trou de l'embout de la ceinture et du trou du siège, remettre la vis dans le trou de la tubulure. Assurez-vous que les vis sont bien resserrés.
- Ajuster la ceinture à la longueur désiré en vous servant de l'attache noir qui retient la ceinture en place.
- Placer le moniteur hors de portée du patient de façon qu'il ne puisse arrêter le moniteur lui-même.



Step 2

Brancher la ceinture de fauteuil


- Brancher la ceinture dans le bas du moniteur de gestion de chute.
- Assurez-vous d'enfiler le cordon du coussinet dans l'emplacement en forme de T, en pliant le cordon afin de sécuriser le cordon.

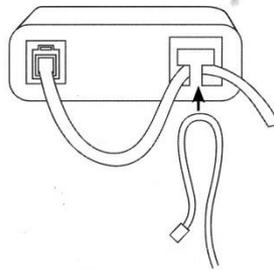

Step 3

Ajustement

- Pour ajuster le volume, la tonalité et le délais, ouvrir le compartiment de la pile à l'arrière afin d'accéder aux ajustements.
- Utiliser un petit tournevis cruciforme pour ajuster le volume. Par défaut le volume est ajusté à 90 décibels. (90 décibel est la norme gouvernementale.
- Glisser le contact de l'interrupteur de tonalité à 3,2 ou 1.
- Les ajustements peuvent différer dépendant du moniteur.

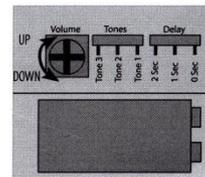

This is a diagram of the inside of the TL-21005 monitor battery case. Different monitors may look different.

Step 4


Essai du système

- Détacher et attacher la ceinture pour initialiser l'alarme.
- Le moniteur est maintenant activé et prêt à avertir dans le cas que la ceinture serait détaché.
- Quand l'alarme est activé appuyer sur le bouton (Reset). L'alarme sera mis hors circuit.

Step 5

Moniteur en mode sécurité

- Pour mettre en mode (Caregiver on) glisser le contact sur le côté du moniteur (Reset on) à (Caregiver on). Quand le moniteur est en mode (Caregiver) sécurité, seul le personnel soignant peut arrêter l'alarme. Passer la clef Caregiver aimanté sur le cercle rouge sur le devant du moniteur.

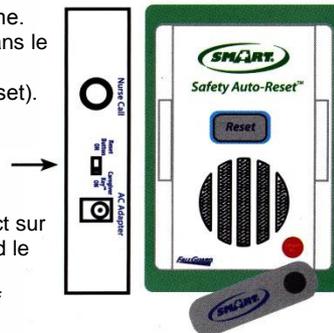

TL-2109V Système de surveillance de

Le fait de ne pas se conformer aux avertissements de sécurité peut entraîner des blessures ou même la mort. Ce produit n'est pas pertinent pour tous les individus. D'autres types d'équipements pourraient s'avérer nécessaire. Ce produit n'est pas un substitut à une supervision visuel par le personnel. Le manufacturier ne prétend pas que le produit empêchera les fugues ainsi que les chutes. Ce produit a été conçu pour permettre d'augmenter l'efficacité du personnel dans leur protocole de gestion de chute. Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Lisez les directives ainsi que les avis légaux.

La ceinture TL-2109V de la compagnie Smart Caregiver a été conçu pour permettre à l'utilisateur de faire l'installation lui-même, de ce fait il est de l'entière responsabilité de l'acheteur de s'assurer que le produit est installé adéquatement. De plus ce produit n'est pas conçu pour palier une supervision adéquate par le personnel:

1. Supervision directe du résident
2. Formation adéquate du personnel
3. Vérification du système avant chaque utilisation.

AVERTISSEMENT: Le fabricant ne garantit pas que cet appareil empêchera les fugues ou les chutes. Cet appareil est conçu pour aider le personnel aidant dans une optique d'un programme d'aide au résident. Ce produit doit être utilisé par du personnel qualifié.

Besoin d'aide Communiquez avec votre distributeur local.

ExtraMédical

info@extramedical.com

450-416-1753