


# Toile à ajustement rapide

## Description

La toile à ajustement rapide est conçue pour tous les transferts avec des lève-personnes au sol et sur rail fabriqués par ArjoHuntleigh. Cette toile peut être utilisée pour transférer un patient d'un lit, d'un fauteuil roulant, d'une chaise gériatrique, de la toilette, d'une chaise de douche ou du sol. Elle peut être utilisée pour des patients qui ont des limitations de la partie supérieure du corps. Toutefois ces patients doivent bien contrôler leur tête, car la toile n'offre pas de soutien à la tête. Cette toile convient parfaitement aux personnes trapues ou obèses qui ont des hanches larges ou de grosses cuisses. Les bras du patient doivent demeurer à l'intérieur de la toile en tout temps.

## Toile à ajustement rapide

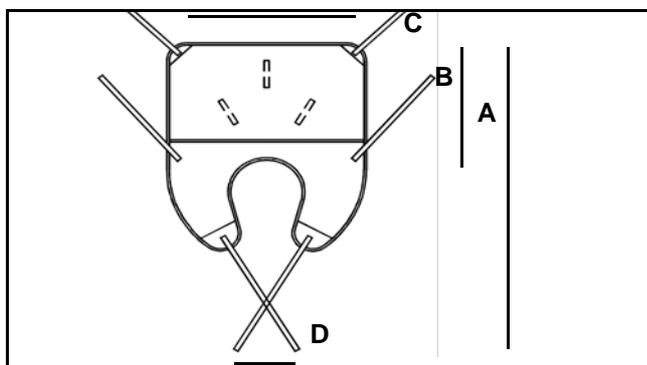

## Numéro de pièce et modèle

TIR-S - petite toile à ajustement rapide  
(recommandée pour les patients de 20 à 45 kg /  
45 à 100 lb)

A: 102 cm/40 po

B: 56 cm/22 po

C: 89 cm/35 po

D: 31 cm/12 po

TIR-M - moyenne toile à ajustement rapide  
(recommandée pour les patients de 45 à 90 kg /  
100 à 200 lb)

A: 117 cm/46 po

B: 66 cm/26 po

C: 99 cm/42 po

D: 36 cm/14 po

TIR-L - grande toile à ajustement rapide  
(recommandée pour les patients de 90 à 272 kg /  
200 à 600 lb)

A: 127 cm/50 po

B: 71 cm/28 po


C: 109 cm/43 po

D: 37 cm/14 po

## Positionnement de la toile


### Position assise

- 1) Alignez le centre de la toile avec la colonne vertébrale du patient. L'ouverture en U de la toile doit être placée sur le coccyx du patient

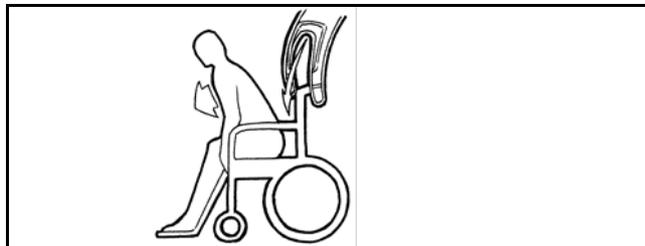


### Patient allongé sur le dos


- 1) Roulez le patient doucement sur le côté. Placez la toile pliée en deux sur le sens de la longueur, sous la colonne vertébrale du patient. L'ouverture en U de la toile doit se trouver sous la base de la colonne vertébrale (le coccyx).

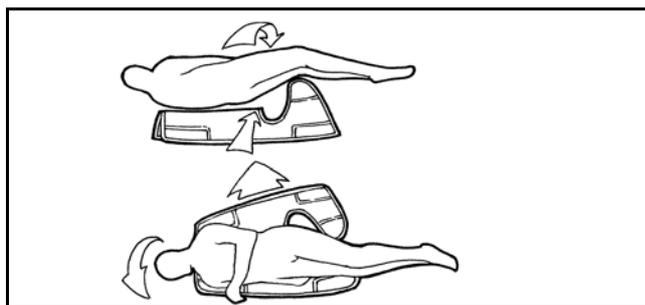

- 2) Passez les courroies les plus courtes par-dessus la hanche, puis sous les cuisses.

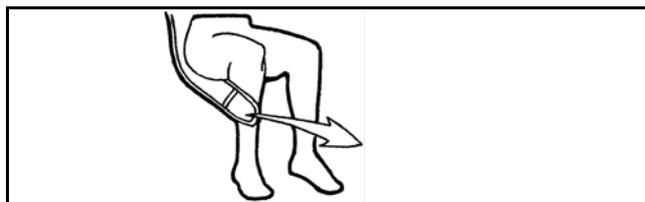

- 3) Croisez les courroies l'une par-dessus l'autre.

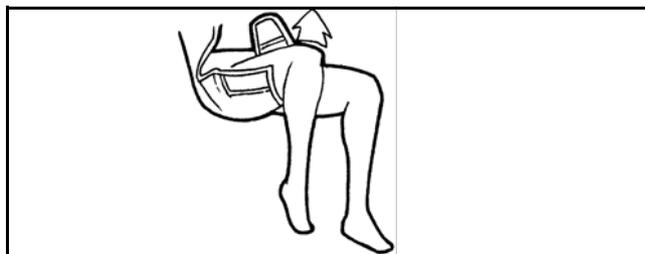

# Caractéristiques - toile à ajustement rapide

## POSITIONNEMENT DU PATIENT SELON LA COULEUR DES COURROIES

	Épaules	Jambes
	Noir	Bleu
	Gris	Bleu
	Bleu	Bleu
	Bleu	Gris



### OPTION 1 PONT

Option la plus sécuritaire, généralement recommandée pour la plupart des patients et des transferts.



### OPTION 2 AMPUTÉ

Cette position n'est pas recommandée pour des patients agités ou qui souffrent d'infirmité motrice cérébrale.

Procure un support adéquat pour les personnes amputées sous le genou.

## Caractéristiques de la toile à ajustement rapide

Caractéristiques	Avantages
Tissu en polyester souple	Tissu ultra souple et confortable, spécialement conçue pour durer longtemps, facile à manipuler et à installer sur un lit.
Section rembourrée en nylon/polyester pour les jambes	Empêche les irritations cutanées causées au patient et s'installe facilement sur un patient déjà assis, puisque celui-ci n'a pas à s'asseoir sur la toile.
Courroies solides en nylon/polyester avec boucles de positionnement	Permet différentes positions (assise, semi-inclinée, ou inclinée) et de plus grandes possibilités d'ajustement.
Courroie spécialement conçue pour les jambes	Assure la sécurité des patients, même lorsque ceux-ci sont agités. Position des jambes ajustable. Les jambes peuvent être positionnées ensemble, semi-ouvertes ou écartées.
Renforcement supplémentaire	Idéal pour les patients obèses ou trapus, puisqu'il y a plus d'espace pour la région des fesses et des hanches et un meilleur soutien du poids sur les côtés.
Poignées de positionnement	Les poignées permettent le déplacement des patients d'une position à une autre et le positionnement adéquat d'un patient dans une chaise, sans avoir à faire de réajustement. Les transferts d'une position allongée à une position assise sont faciles et rapides. La poignée permet au préposé de pivoter le patient de manière sécuritaire.
Charge maximale d'utilisation de 272 kg (600 lb)	Solide et durable, la toile garantit la sécurité du patient.
Tailles S, M, L	La taille moyenne convient à la plupart des patients. Les petites toiles s'adaptent à la clientèle pédiatrique et les grandes toiles conviennent aux patients les plus corpulents.
Lavable à la machine	Simple à entretenir et à nettoyer.