


## TOILE FLEXI-TOILE INST. RAPIDE #2000

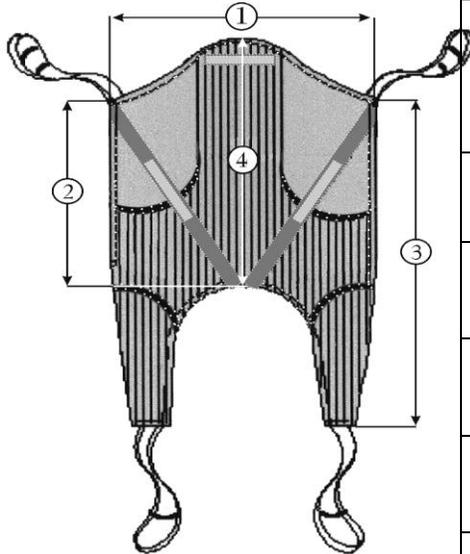

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES			
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)	4 (pce/cm)
EXTRA PETIT	LILAS	31.5/78.75	12/30	33/82.5	22/55
PETIT	ROUGE	33.5/83.75	14/35	35/87.5	23.5/58.75
MOYEN	VERT	35/87.5	15/37.5	37/92.5	25/62.5
GRAND	JAUNE	37/92.5	15.5/38.75	39/97,5	26/65
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	40/100	16/40	41/130	28/70

## ENTRETIEN DE LA TOILE

### INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

### LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à **basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F** pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une **température maximale de 25°C ou 90°F**.

**NE PAS APPLIQUER DE PRESSION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSION. NE PAS TORDRE LE TISSU.**



Ne pas repasser.