


Figure 1

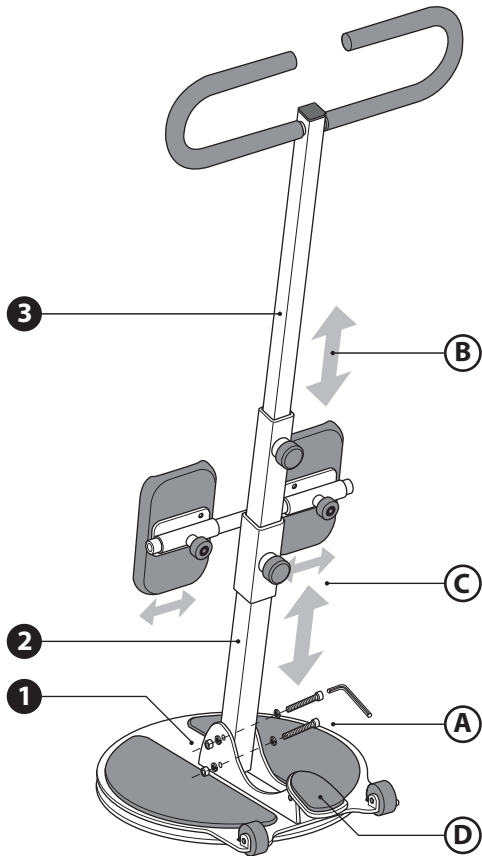

Instructions d'assemblage (voir Figure 1):

Enlever le boulon de fixation qui retient le tube principal (2) à la base (1).

Aligner la base (1) et le tube principal (2). Assembler vous servant du boulon de fixation (A).



Instructions d'utilisation (voir Figure 2, 3 et 4):

Un transfert sécuritaire et facile d'une position assise à une autre position assise avec le disque E-Z Turn:

- Ajuster le manche (3) à la hauteur appropriée pour le patient ainsi que pour l'assistant (B).
- Placer le disque E-Z Turn entre le patient et la place où on veut le rasseoir.
- Ajuster la hauteur ainsi que la distance entre les coussins à genou (C). Positionner les genoux du patient au centre des coussins à genou.
- Tout en tenant la poignée du haut de façon sécuritaire, l'assistant applique le frein en barrant la pédale (D).
- Le patient se lève debout en se servant de la poignée du bas (Figure 2).
- Pendant que le patient se tient fermement à la poignée du bas, l'assistant relâche le frein et fait tourner/pivoter le disque E-Z Turn (Figure 3).
- L'assistant applique le frein en barrant la pédale et le patient se rasseoit à la nouvelle place (Figure 4).



Les roues du disque E-Z Turn le rendent portable et maniable mais ne sont pas conçues pour transporter le patient lors d'un transfert.

Figure 2



Figure 3

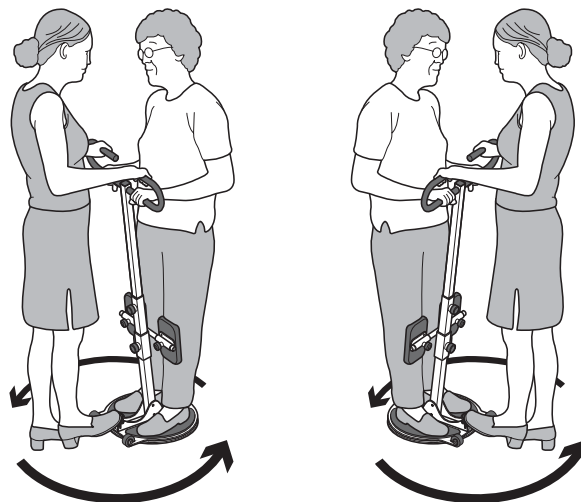


Figure 4

