


TOILE EN U INST. RAPIDE #640

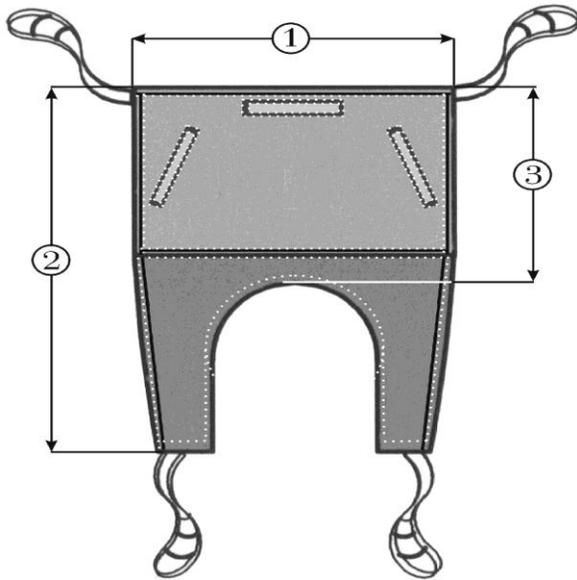

GRANDEUR DE LA TOILE	COULEUR DU PREMIER CROCHET	DIMENSIONS APPROXIMATIVES		
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)
EXTRA PETIT	LILAS	31.5/78.75	42/105	22/55
PETIT	ROUGE	33/82.5	44/110	23/57.5
MOYEN	VERT	35/87.5	47/117.5	25/62.5
GRAND	JAUNE	36.5/91.25	49/122.5	27/65
EXTRA GRAND	BLEU ROYAL	37.5/93.75	51/127.5	27.5/68.75

ENTRETIEN DE LA TOILE

INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit
- Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la toile.

LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins **trois minutes**.



Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.



Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

NE PAS APPLIQUER DE PRESSION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSION. NE PAS TORDRE LE TISSU.



Ne pas repasser.