

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

LIT «BAMBINO » POUR ENFANTS 4702

Avant toute utilisation : consultez la notice et donnez les consignes de sécurité au patient et à son entourage.

Contrôle à réception : assurez-vous de l'état du mobilier et de l'intégralité des matériaux par un contrôle visuel.



La fonction et l'usage du lit sont exclusivement réservés pour l'hospitalisation et le maintien à domicile.

Vous venez d'acquérir un produit **SOTEC MEDICAL**. Votre choix s'est porté sur un matériel de qualité qui a fait l'objet d'un contrôle final individuel. Afin de bénéficier de tous les avantages de ce matériel, il est impératif de lire attentivement cette notice et d'en suivre les consignes. Aussi, pour des raisons de sécurité, il est primordial que les utilisateurs de nos dispositifs ne laissent personne utiliser ceux-ci sans les avertir de leurs conditions de bon fonctionnement.



SOMMAIRE

Sommaire	2
Symboles	3
Conformité	3
Définition des symboles de la notice	3
Symbolisation générale sur le lit	3
Descriptif.....	4
Vue d'ensemble.....	4
Informations complémentaires	5
Options	5
Accessoires.....	5
Instructions d'utilisation	6
Utilisation.....	6
Câblage.....	6
Références des différents éléments.....	7
Utilisation du freinage des roues	8
Utilisation de la butée murale.....	8
Précautions et informations	9
Démontage	11
Remontage.....	12
Utilisation des options.....	13
Utilisation de la condamnation des fonctions sur la télécommande (blocage total)	13
Utilisation du blocage centralisé	14
Habillage bois.....	14
Montage des accessoires	15
Montage de la barrière.....	15
Montage de la potence.....	17
Montage des dossierets	17
Montage de la tige porte sérum	18
Montage du porte sac à urine.....	18
Montage du support télécommande sur potence	19
Montage du support télécommande magnétique	19
Limites d'utilisation	20
Résolution de problèmes	20
Situation d'urgence.....	21
Caractéristiques techniques	22
Recommandations CEM.....	25
Entretien	29
Nettoyage et désinfection	29
Précautions obligatoires	29
Mise au rebut.....	30
Garantie	30
Maintenance	31
Contrôle de qualité.....	32
Suivi d'entretien	35

SYMBOLES

Conformité

	Ce produit a fait l'objet de tests selon <i>la directive 93/42/CEE.</i>
---	---

Définition des symboles de la notice


	Symbole « ATTENTION » <i>Celui-ci signale une situation ou une opération pouvant influencer sur la sécurité du patient. Il peut aussi mettre en évidence certaines précautions ou procédures que le personnel doit suivre.</i>
---	---

Symbolisation générale sur le lit

	Attention, consulter les documents d'accompagnement
	Classe de l'appareil : classe II
	Appareil type B
	Courant alternatif
	Courant continu
	Borne d'équipotentialité
	Rayonnement non ionisant

DESCRIPTIF

Vue d'ensemble

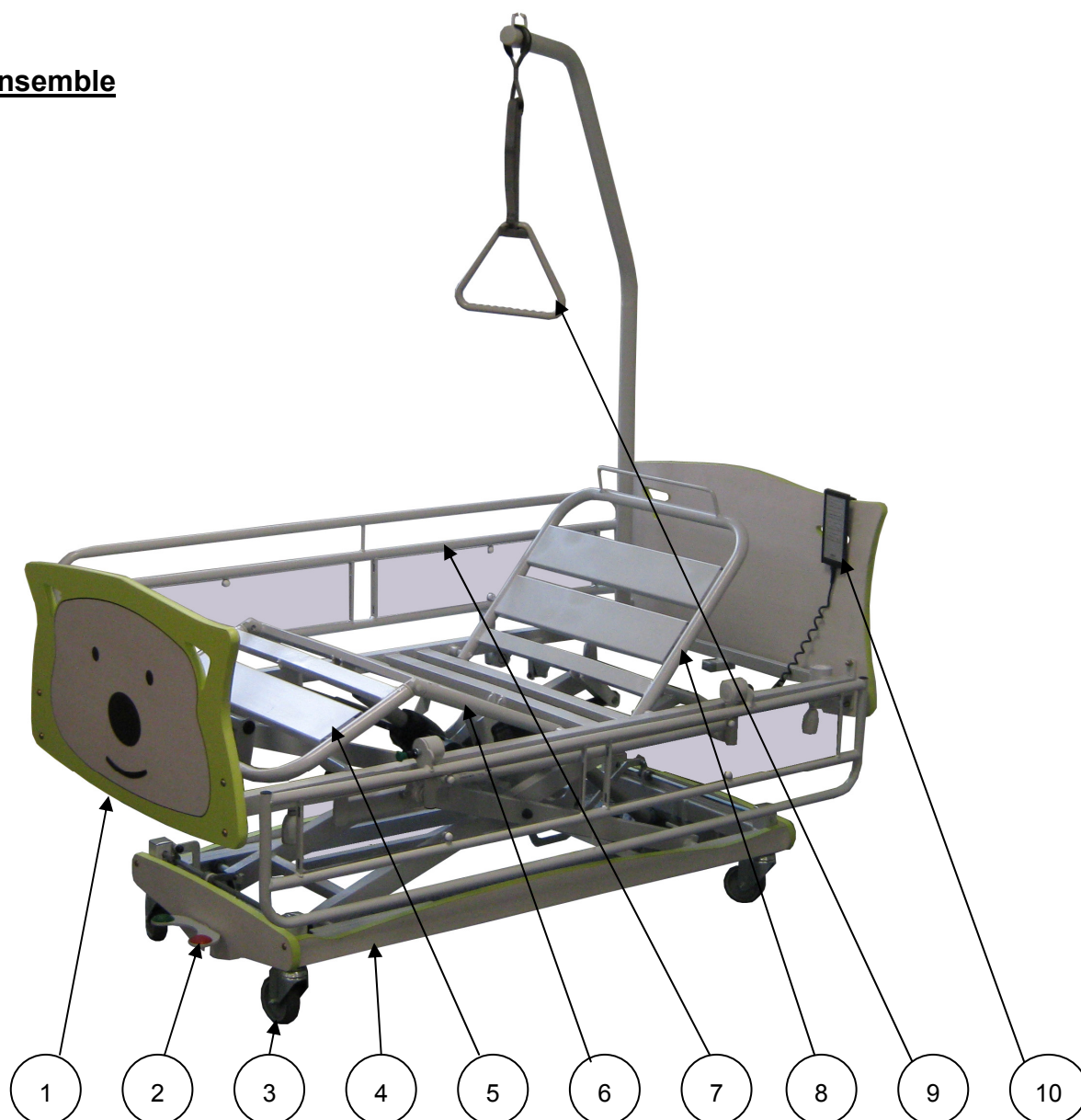

- 1 : Dossieret (*accessoire*)
- 2 : Pédale de commande blocage centralisé (*en option*)
- 3 : Roue Ø100
- 4 : Habillage bois (*en option*)
- 5 : Relève jambes
- 6 : Relève cuisses
- 7 : Barrières (*accessoire*)
- 8 : Relève buste
- 9 : Potence (*accessoire*)
- 10 : Télécommande

Remarque : Il n'y a ni proclive, ni déclive sur ces modèles.

**** Les photos du document sont non contractuelles ****

Informations complémentaires

VERSION	HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE	SOMMIER 1 PARTIE	RELEVÉ BUSTE		RELEVÉ CUISSSES		RELEVÉ JAMBES	
			ELECTRIQUE	TRANSLATION	MANUEL	ELECTRIQUE	MANUEL	ELECTRIQUE
2PE	✓	✓	✓				✓	
2PEE	✓	✓	✓					✓
3PEE	✓	✓	✓			✓	✓	



- Les plans de couchage de chaque version sont équipés de lattes métalliques soudées.
- Butée murale en série. (sauf dans le cas d'un lit équipé d'un habillage bois sur piètement)
- Les lits SOTEC MEDICAL sont équipés de dossierets tête et pieds. Dans le cas contraire, ne connaissant pas l'utilisation future du dispositif médical, nous préconisons que le client demande des bouchons de sommier afin d'éviter tout désagrément.

Options

- Blocage centralisé des 4 roues.
- Condamnation des fonctions de la télécommande.
- Habillage bois.

Accessoires


Seuls les différents accessoires répertoriés ci-après sont utilisables sur le lit 4702. Tout autre accessoire, non présent dans cette liste, ne peut être utilisé avec ce lit car il n'a pas fait l'objet d'une étude par nos soins.

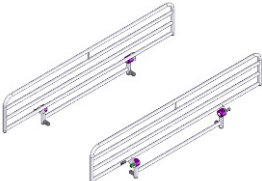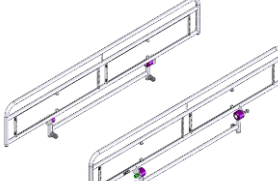Accessoires			Accessoires		
Désignation		Référence	Désignation		Référence
Barrières pliantes *barreaux*		4482.009	Barrières pliantes *plexi*		4482.010
Dossierets (suivant modèles).		4998.720 4998.721	Support télécommande sur flexible aimanté		0110.080
Potence 		4975.050	Tige porte sérum chromée 		2 crochets 1190.001
					4 crochets 1190.011
					Télescopique 2 crochets 1190.005
					Télescopique 4 crochets 1190.012
Porte sac à urine 		4952.903	Support télécommande sur potence		PL0035

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques dimensionnelles

L1	Longueur hors tout	174 cm
L2	Largeur hors tout	90.5 cm
L3	Longueur plan de couchage	160 cm
L4	Largeur plan de couchage	80 cm
H1	Hauteur maxi (sol / sommier)	90 cm
	Hauteur mini (sol / sommier)	29.5 cm
H2	Hauteur barrière relevée	32.5 cm
H3	Hauteur sous châssis (<i>voir précautions page 9</i>)	14.5 cm
B	Angle maxi relève Buste	70°
C	Angle maxi relève Cuisses	24.5°
J	Angle maxi relève Jambes	23.5°

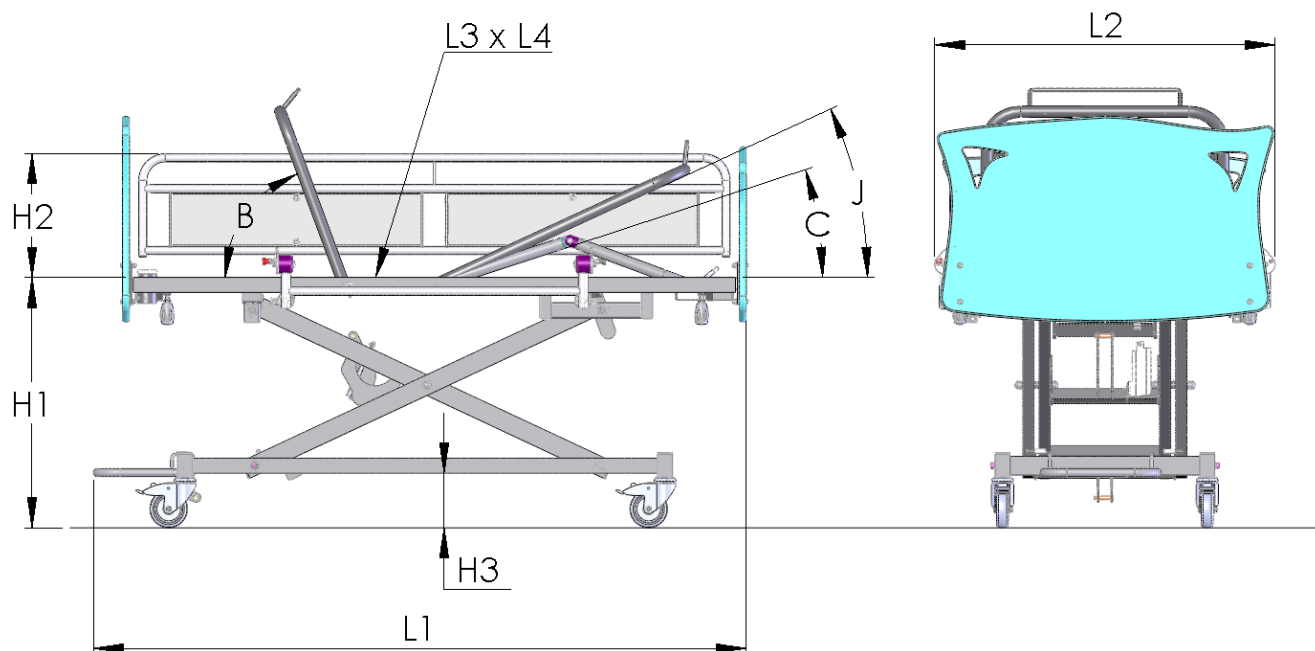

Ces données dimensionnelles peuvent varier en fonction des tolérances de fabrication.